

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	OPERASIONAL MESIN SEALING		
	Nomor Dokumen : <i>OT02.02/XXXIX.1/2304/2018</i>	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Mesin Sealing adalah alat yang digunakan untuk merekatkan pouches pengemas instrument		
TUJUAN	Untuk merekatkan pouches sesuai jenis dan material pouchesnya, sehingga instrument yang dikemas dalam pouches tidak terkontaminasi dan terjaga kualitas sterilitasnya.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.1/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Cuci tangan dan gunakan APD 2. Nyalakan mesin sealing. 3. Lakukan uji fungsi rekatan sealing setiap hari sebelum digunakan. 4. Setting suhu mesin sealing a. 165 – 185°C untuk sealing pouches Instrument yang di steam b. 125 – 135°C untuk sealing pouches instrument yang di plasma c. 165 – 185°C untuk sealing pouches BMHP kasa yang di steam 5. Setting rell mesin sealing sesuai kebutuhan. 6. Rekatkan ujung pouches dengan cara memasukkan pouches ke rell mesin sealing 7. Masukkan instrument beserta indikator internal, kemudian rekatkan pouches bukaan kemasan dengan cara memasukkan pouches ke rell mesin sealing. 8. Lakukan dokumentasi 9. Lepaskan APD lalu cuci tangan.		
UNIT TERKAIT	Sterilisasi Sentral		
DOKUMEN TERKAIT	Formulir uji fungsi hasil rekatan pouches yang di sealing		