

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT FUNDUSCOPY ZEISS VISUCAM 200		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ 879/2024	No. Revisi: 00	Halaman: 1/3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit: 13 Mei 2024	Ditetapkan: Direktur Utama \${{td}} dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Funduscopy merupakan suatu alat untuk melakukan pemeriksaan mata yaitu melihat bagian fundus mata (struktur belakang dan dalam mata, termasuk penampang retina) untuk mengevaluasi kesehatan mata dan mengidentifikasi kondisi medis yang mungkin mempengaruhi kesehatan mata atau tubuh secara keseluruhan.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui petunjuk penggunaan alat funduscopy. 2. Memastikan operator pengguna menggunakan alat funduscopy sesuai dengan prosedur. 		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Fasyankes, 2015 		

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT FUNDUSCOPY ZEISS VISUCAM 200

No. Dokumen:

OT.02.02/D.XXIII/
879/2024

No. Revisi:

00

Halaman:

2/3

PROSEDUR

1. Mengaktifkan Funduscopy Visucam 200

- Tekan tombol ON/OFF pada Power Isolation Transformer
- Tekan tombol ON/OFF yang terletak di sebelah kanan alat Visucam untuk menghidupkan Visucam
- Tunggu beberapa saat hingga muncul Patient Manager pada layar monitor


2. Cara Pengoperasian Funduscopy Visucam 200

- Masukkan data pasien baru dengan menekan tombol NEW atau mencari data pasien yang sudah ada di database Visucam dengan memasukkan nama pasien di kolom yang berada di sebelah tombol SEARCH, kemudian tekan tombol SEARCH.
- Pilih nama pasien yang akan difoto fundus, kemudian tekan tombol




. Lalu pilih dan tekan YES.

- Tunggu beberapa saat hingga muncul Capture Mode pada layar monitor (lihat Gambar di bawah ini):

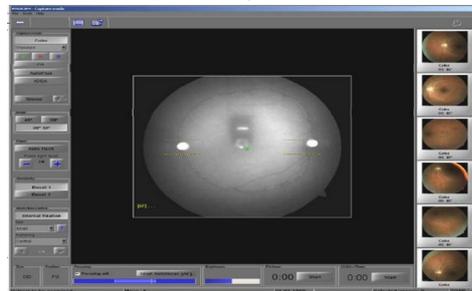


- Tentukan tipe foto fundus yang diinginkan (Capture mode, Angle, Flash, dan Fixation light and position)
- Posisikan kepala pasien pada Visucam (perhatikan posisi mata pasien apakah sejajar pada garis merah)
- Dorong Visucam ke arah depan menggunakan joystick dan perhatikan pupil pasien (lihat Gambar di bawah ini). (Apabila pupil pasien lebih kecil dari lingkaran dalam, gunakan Angle 30° SP, dan untuk pengambilan Optic Disc gunakan angle 30°).

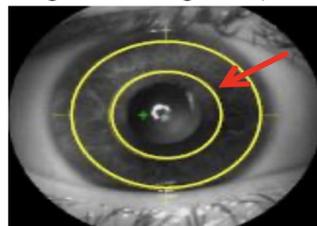

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN ALAT FUNDUSCOPY ZEISS VISUCAM 200

No. Dokumen:	No. Revisi:	Halaman:
OT.02.02/D.XXIII/ 879/2024	00	3/3

- Dorong Visucam ke arah depan lagi hingga terlihat 2 buah bulatan putih dan persegi panjang putih (lihat Gambar di bawah ini)

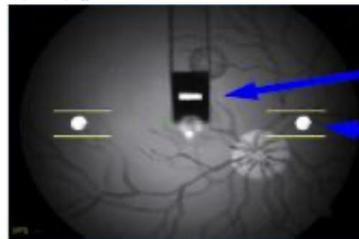

- Posisikan 2 buah bulatan putih berada di antara 2 garis kuning dan persegi panjang putih harus sejajar (lihat Gambar di atas)
- Kemudian tekan tombol yang ada di joystick untuk mengambil foto fundus pasien
- Untuk mencetak hasil foto fundus. Tekan tombol  untuk kembali ke Patient Manager
- Pilih nama pasien dan foto fundus yang ingin dicetak. Lalu tekan tombol  untuk melihat foto fundus yang dipilih, dan tekan tombol  untuk melihat contoh hasil cetakan.
- Tekan tombol  untuk mencetak hasil foto fundus.

3. Menonaktifkan Funduscopy Visucam 200

- Pada tampilan Patient Manager, pilih menu File kemudian pilih Exit
- Kemudian pilih Continue (catatan: jangan memilih / memberikan tanda ceklis pada pilihan apapun)
- Tunggu beberapa saat hingga alat siap dimatikan
Tekan tombol ON / OFF pada Power Isolation Transformer dan Visucam, untuk mematikan Visucam.

UNIT TERKAIT

1. Tim Kerja Pelayanan Penunjang
2. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik

DOKUMEN TERKAIT

User Manual Funduscopy Visucam 200



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

"Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen"

Nomor Dokumen

OT.02.02/D.XXIII/879/2024

Tanggal Efektif

13 Mei 2024

Halaman

3 halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagai berikut :

Tanggal : 13 Mei 2024 Penambahan dokumen

Nama : dr. Adhy Nugroho, MARS Perubahan dokumen

Unit Kerja : Tim Kerja Pelayanan Penunjang Pengurangan dokumen

Judul SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNAAN ALAT FUNDUSCOPY ZEISS
VISUCAM 200

Beri tanda V pada kotak yang diperlukan

(PEMOHON)

dr. Adhy Nugroho Mars

No	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/D.XXIII/879/2024	00	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Fasyankes, 2015	Penambahan Dokumen SOP Tim Kerja Pelayanan Penunjang	