

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PROSES PELUMASAN DAN PERAWATAN ALAT DAN INSTRUMEN		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXI.I /16676/2019	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 18 Oktober 2019	 Ditetapkan : Direktur Utama, Dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002	
PENGERTIAN	Adalah suatu proses perawatan dan pelumasan alat medis setelah selesai dicuci.		
TUJUAN	1. Memperpanjang umur pakai alat dan instrumen. 2. Mengurangi timbulnya karat pada alat dan instrumen. 3. Menghilangkan efek karat yang mempengaruhi fungsi alat dan instrumen.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/16583/2019, tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD. 2. Pastikan alat dan instrumen kondisi bersih dan kering. 3. Lakukan uji fungsi alat dan instrumen. 4. Gunakan pelumas sesuai rekomendasi pabrikan. 5. Pada saat uji fungsi ditemukan ada engsel alat dan instrument kesat/ tidak normal, semprotkan pelumas keseluruhan permukaan engsel. 6. Jika ditemukan engsel alat dan instrumen yang kesat, lakukan pelumasan ber ulang sampai engsel berfungsi normal. 7. Dan jika ditemukan alat medis yang cacat, rusak, dan tidak layak, segera laporkan ke penanggung jawab sterilisasi sentral dan lakukan konfirmasi ke ruangan yang bersangkutan. 8. Kemas alat dan instrumen yang lolos uji fungsi. 9. Lepas APD dan cuci tangan.		
Unit Terkait	1. Sterilisasi Sentral 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Intensive Care 4. Rawat Inap dan Rawat Jalan		
Dokumen Terkait	1. Formulir Uji Fungsi 2. Formulir Permintaan Sterilisasi 3. Formulir Perawatan Alat Medis		