

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PRODUKSI BMHP STERIL		
	Nomor Dokumen : <i>OT.02.04/XXXIX.I/2330/2018</i>	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Produksi BMHP steri adalah kegiatan proses penyimpanan BMHP steril mulai dari pemilihan BMHP yang berkualitas, proses pemotongan dan pelipatan, proses pengemasan dan labeling sampai dengan proses sterilisasi dan uji mutu visual BMHP steril.		
TUJUAN	Membantu unit kerja di rumah sakit dalam menyediakan BMHP steril yang berkualitas dan aman dipakai oleh pasien		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD 2. Kontrol Kualitas/ uji visual BMHP : a. Kasa sesuai standar b. Lidi kapas sesuai standar c. Pouches sesuai standar d. Waches sesuai standar 3. Ukuran BMHP : a. Potongan 12 x 12 untuk kassa lipat 4 x 4 cm dan deeper kecil b. Potongan 21 x 24 untuk kassa lipat 7 x 8 cm dan deeper besar c. Potongan 30 x 30 untuk kasa lipat 10 x10 cm d. Potongan untuk tampon e. Waches ukuran 1 x 3 cm 4. Pemotongan pouches sesuai ukuran kasa dan lidi kapas 5. Pelipatan kasa ukuran: a. Kasa 4 x 4 b. Kasa 7 x 8 c. Kasa 10 x 10 d. Kasa tampon 6. Pengemasan dalam pouches disesuaikan dengan jenis dan isi dari : a. Kasa 4 x 4 isi 5 lembar/ kemasan Kasa 7 x 8 isi 5 lembar/ kemasan Kasa 10 x 10 isi 5 lembar/ kemasan b. Kasa tampon 1 roll / kemasan c. Lidi kapas 1 pcs / kemasan d. Waches 5 lembar / kemasan 7. Masukkan indikator internal dalam setiap kemasan. 8. Sealing tiap kemasan pouches 9. Lakukan labeling tanggal sterilisasi dan tanggal expire date 10. Susun BMHP dalam keranjang sesuai ukuran. 11. BMHP siap untuk disterilkan dengan metoda sterilisasi suhu tinggi (autoclave).		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PRODUKSI BMHP STERIL		
	Nomor Dokumen :	No. Revisi : 01	Halaman : 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama. dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PROSEDUR	12. Lakukan Uji visual. 13. Simpan BMHP kedalam Box kontainer tertutup 14. Catat BMHP steril yang disimpan pada kartu stok. 15. Lakukan sistem FIFO untuk pendistribuaian BMHP. 16. BMHP yang di distribusikan berdasarkan jenis dan jumlah permintaan. 17. Lepas APD, kemudian cuci tangan. 18. Lakukan dokumentasi		
DOKUMEN TERKAIT	1. Formulir permintaan BMHP 2. Formulir uji visual		