


	PENGANTIAN REAGENT PACK NOVABIOMEDICAL PHOX		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/9243/2025	No. Revisi : 02	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 13 Juni 2025	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Merupakan prosedur baku yang memuat tata cara penggantian <i>Reagent Pack</i> alat Novabiomedical pHox untuk pemeriksaan Analisa Gas Darah (AGD).		
TUJUAN	Sebagai panduan bagi Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) dalam melakukan penggantian <i>Reagent Pack</i> alat Novabiomedical pHox untuk pemeriksaan AGD, agar hasil pemeriksaan valid.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	<i>Reagent Pack</i> diganti saat reagen habis. Penggantian <i>Reagent Pack</i> 1. Menekan " <i>Menu</i> " pada monitor. 2. Menekan " <i>Change Calibrator Cartridge</i> ". 3. Menarik <i>reagent pack</i> yang lama, memasukkan <i>reagent pack</i> yang baru setelah menghomogenkan selama ± 10 detik. 4. Menekan " <i>Move Probe</i> ", mengganti karet septum dengan yang baru setelah jarum keluar, kemudian menekan " <i>Move Probe</i> " kembali sampai jarum kembali pada posisi semula. 5. Menekan " <i>Install / Prime</i> ". Setelah proses <i>priming</i> selesai, layar kembali ke menu awal. 6. Menekan " <i>Calibrate</i> " setelah kembali ke menu awal. Lalu, melakukan kalibrasi internal dan eksternal. 7. Memastikan pH, pCO ₂ , pO ₂ , Hct tidak ada tanda silang setelah selesai kalibrasi.		
UNIT TERKAIT	1. Tim Kerja Pelayanan Penunjang (Teknisi Atem) 2. IPSRS (Teknisi Listrik) 3. Pihak Eksternal (Vendor Alat & Reagen)		

ALUR PENGgantian REAGENT PACK NOVABIOMEDICAL PHOX

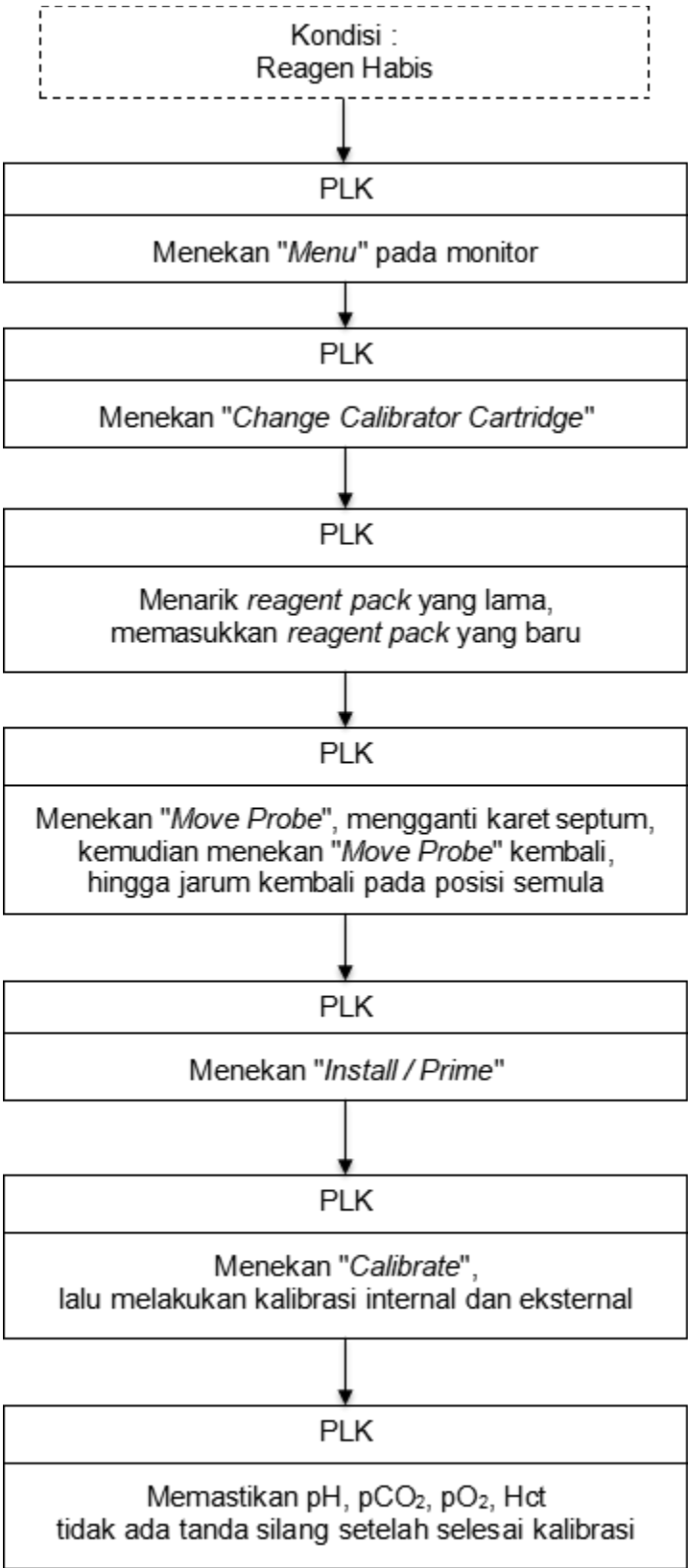

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/9243/2025
		Tanggal Efektif	: 13 Juni 2025
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 5 Desember 2024
Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen
☒ Perubahan Dokumen
☐ Pengurangan Dokumen
Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

Ka. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX/3281/2018; 16 April 2018	ke-2	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/XXXIX.1/2742/2018	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa .	➤ Kop dan logo lama ➤ Judul : Standar Prosedur Operasional dari Kalibrasi Eksternal dan Penggantian <i>Reagent Pack</i> Novabiomedial PHOx ➤ Ada prosedur kalibrasi eksternal	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, mengubah judul, menghapus prosedur kalibrasi, , revisi unit terkait