



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN ALAT ANGIOGRAPH PHILIPS ALLURA XPER FD20 BIPLANE

No. Dokumen:
OT.02.02/D.XXIII/
790/2024

No. Revisi:
00

Halaman:
1/2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tanggal Terbit:

30 April 2024

Ditetapkan:
Direktur Utama

§{ttd}

**dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S.,
M.A.R.S.**

PENGERTIAN

Angiograph merupakan alat pendukung neurointervensi yaitu tindakan yang dilakukan pada pembuluh darah di otak untuk membuka sumbatan (thrombectomy, rhtombolysis) pemasangan ring pada pembuluh darah otak.

TUJUAN

1. Mengetahui petunjuk pemeliharaan alat angiograph
2. Memastikan operator pengguna dan teknisi elektromedis melakukan pemeliharaan alat angiograph.
3. Meminimalisasi atau mencegah kerusakan alat yang fatal
4. Memberikan keamanan bagi pasien dan operator pengguna

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Fasyankes, 2015

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN ALAT ANGIOGRAPH PHILIPS ALLURA XPER FD20 BIPLANE		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ 790/2024	No. Revisi: 00	Halaman: 2/2
PROSEDUR	Prosedur Pemeliharaan Angiograph Philips Allura Xper FD20 : - Sebelum alat digunakan cek kondisi spacer dan selang pelindung kabel - Cek semua aksesoris pendukung, pastikan tersedia - Cek semua control panel, pastikan berfungsi dengan baik - Cek rem dan roda, pastikan berfungsi dengan baik - Cek semua indikator, pastikan berfungsi dengan baik - Cek kabel, periksa apakah ada kabel kusut / retak - Cek meja periksa, pastikan dalam keadaan bersih - Cek aksesoris, untuk memastikan aksesoris yang digunakan terpasang erat pada meja - Cek pelindung radiasi, periksa apakah ada kerusakan - Cek inscriptions and labels - Cek tube frontal dan lateral ARC, untuk memastikan masa pakai peralatan yang optimal, periksa apakah track bebas dari debu, minyak, ataupun partikel lain - Cek beam limitation, apabila diduga alat pembatas sinar x tidak berfungsi		
UNIT TERKAIT	1. Tim Kerja Pelayanan Penunjang 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Instalasi Radiologi		
DOKUMEN TERKAIT	User Manual Angiograph Philips Allura Xper FD20		