



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PROSES PENGELOLAAN INSTRUMENT SINGLE USE YANG DI RE USE

Nomor Dokumen : No. Revisi :

OT.01.01/XXXIX.1/
2323/2018

01

Halaman :

1/4

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

28 Maret 2018

Ditetapkan :
Direktur Utama,

dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Instrument single use adalah suatu alat/ instrument yang sebagian atau keseluruhan komponen diperuntukkan untuk sekali pakai, akan tetapi dalam pengadaan alat susah didapat dan harga mahal, maka instrument tersebut di proses ulang sesuai dengan standar.

TUJUAN

1. Memberikan jaminan bahwa instrument tersebut aman dipakai untuk pasien.
2. Menurunkan biaya RS dalam penyediaan alat kesehatan
3. Memelihara efektifitas dan mutu alat kesehatan steril
4. Mengurangi resiko infeksi
5. Meningkatkan masa pakai alat kesehatan

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

PROSEDUR

1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD.
2. Lakukan proses pre cleaning di instalasi terkait.
3. Tempatkan instrument dalam box tertutup.
4. Kirim instrument ke sterilisasi sentral dengan box tertutup, diletakkan diatas trolley, dan di transportasi lewat akses lift kotor.
5. Lakukan serah terima dan uji visual di area serah terima instrument kotor.
6. Menyerahkan dan menandatangani formulir permintaan re use dan kartu monitoring re use yang sudah ditandatangani dokter dan perawat.
7. Proses Dekontaminasi.
 - i. Memisahkan instrument single use dengan instrument re use.
 - ii. Merendam instrument single use di bak perendaman.
 - iii. Menentukan metode Cleaning instrument single use.
 - a. Menggunakan mesin ultrasonic sesuai instruksi pabrikan, untuk instrument berlubang dan mikro
 - b. Menggunakan Mesin washer disinfector sesuai instruksi pabrikan dan jenis instrument.
 - c. Pencucian manual sesuai instruksi pabrikan, atau tingkat kebersihannya tidak maksimal menggunakan mesin automatic.
 - iv. Membilas instrument dengan menggunakan air RO (reverse osmosis).
 - v. Keringkan dengan udara bertekanan, kain lap tanpa serat, dan spuit untuk instrument tertentu dengan metode pengeringan system vacuum.
 - vi. Lakukan uji visual sebelum instrument diserahkan ke area pengemasan.
 - vii. Melakukan dokumentasi
 - viii. Serahkan instrument single use beserta formulir dan kartu monitoring melalui loket serah terima.



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PROSES PENGELOLAAN INSTRUMENT SINGLE USE YANG DI RE USE

Nomor Dokumen : No. Revisi :

01

Halaman :

2/4

PROSEDUR

- 8.
9. Keringkan kembali instrument re use dengan menggunakan mesin drying terutama instrument yang berlubang.
10. Lakukan pengeringan ulang jika tingkat kekeringan belum maksimal.
11. Beri gelang penanda re use

NO	KODE WARNA	PROSES
1	HIJAU	Re Use 1 kali (R-1)
2	BIRU	Re Use 2 kali (R-2)
3	KUNING	Re Use 3 kali (R-3)
4	MERAH	Re Use 4 kali (R-4)
5	HITAM	Re Use 5 kali (R-5)
6	MERAH MUDA	Re Use 6 kali (R-6)
7	UNGU	Re Use 7 kali (R-7)
8	PUTIH	Re Use 8 kali (R-8)
9	ORANGE	Re Use 9 kali (R-9)

12. Kemas instrument dan masukkan indikator internal kedalam kemasan sesuai dengan permintaan proses sterilisasi yang ada di formulir re use.
13. Tempelkan label tanggal expired date sekaligus indikator external.
14. Tulis kode ruangan dan nomor formulir di kemasan instrument pada posisi bukaan atas kemasan bagian belakang.
15. Lakukan dokumentasi
16. Lakukan proses sterilisasi dengan menyertakan BI sebagai jaminan proses steril.
17. Setelah proses steril selesai lakukan kondensasi.
18. Lakukan dokumentasi.
19. Lakukan uji visual.
20. Masukkan ampul BI kedalam incubator untuk di uji.
21. Lakukan dokumentasi.
22. Tulis nomor lot yang terdapat di kartu monitoring re use dengan spidol permanent pada kemasan re use, dengan posisi penulisan sisi plastik pouches didekat bukaan atas.
23. Steples kemasan instrument single use dekat bukaan atas dengan kartu monitoring re use.
24. Simpan instrument re use di area penyimpanan beserta formulir
25. Lakukan dokumentasi
26. Lepaskan APD dan cuci tangan.

UNIT TERKAIT

1. Sterilisasi Sentral.
2. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Ruang Perawatan/ unit kerja lainnya



Rumah Sakit

Pusat Otak Nasional

PROSES PENGELOLAAN INSTRUMENT SINGLE USE YANG DI RE USE


Nomor Dokumen : No. Revisi :

01

Halaman :

3/4

ALUR PROSES SINGLE USE YANG DI RE USE

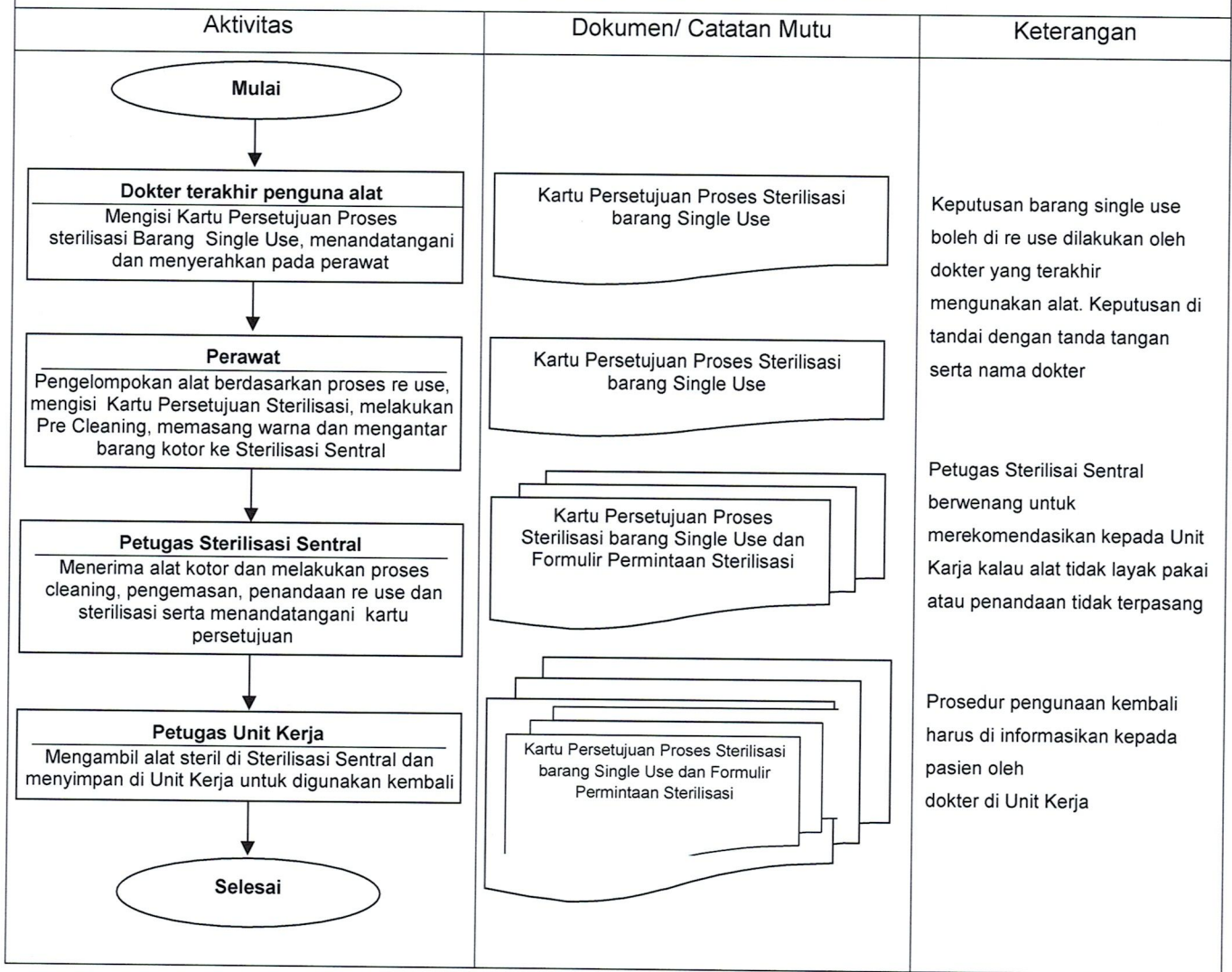



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PROSES PENGELOLAAN INSTRUMENT SINGLE USE YANG DI RE USE

Nomor Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

01

4/4

DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir permintaan sterilisasi instrumen barang re-use.
2. Kartu monitoring single use yang di re use.
3. Formulir permintaan sterilisasi instrumen barang re-use.
4. Kartu monitoring single use yang di re use.
5. Formulir pencucian instrument
6. Formulir uji swab protein
7. Formulir monitoring mesin
8. Formulir monitoring BI
9. Formulir uji visual
10. Kesalahan distribusi