

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENATALAKSANAAN ALAT TEE (TRANS ESOPHAGEAL EKO KARDIOGRAM)		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXI.I /13364/2019	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDURE RASIONAL	Tanggal terbit 19 Agustus 2019	 Ditetapkan : Direktur Utama, Dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Penata laksanaan alat TEE adalah : Proses penanganan alat TEE setelah digunakan pada pasien sampai alat siap digunakan kembali.		
TUJUAN	1. Mencegah infeksi silang 2. Menjamin alat dalam kondisi siap digunakan		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018, tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	1. Persiapan alat - Baju khusus petugas. - APD (topi, masker, google, sarung tangan panjang, apron, sepatu boot) - Enzimatik - Spons lembut - Aqua bidest 1000ml - Cairan DTT+ Indikator strip - Lap microfiber steril - Formulir pemantauan uji efektivitas cairan DTT 2. Petugas mencuci tangan dan menggunakan APD 3. Menyiapkan cairan enzimatik 4. Menyiapkan lap microfiber yang dilembabkan cairan enzimatik. 5. Menyiapkan cairan DTT dan melakukan uji efektivitas 6. Lakukandokumentasi di Formulir pemantauan uji efektivitas cairan DTT 7. Lakukan pre cleaning dengan menggunakan air hangat selama 1 menit, pada alat TEE yang disimpan di rak penyimpanan atau		

	setelah endoscope keluar dari tubuh pasien agar cairan tubuh tidak mengering di endoscope 8. Rendam endoscope pada bagian batang yang flexible kedalam cairan enzimatis sesuai petunjuk penggunaan (IFU) 9. Lakukan pembersihan menggunakan spons lembut. 10. Bilas endoscope menggunakan air hangat selama 1 menit 11. Keringkan endoscope menggunakan lap microfiber. 12. Rendam endoscope pada bagian batang yang flexible dengan cairan DTT sesuai petunjuk penggunaan 13. Bilas endoscope menggunakan aqua bidest sebanyak 3 kali, lama setiap pembilasan dilakukan selama 1 menit 14. Keringkan Endoscope menggunakan lap microfiber steril 15. Bersihkan pegangan probe menggunakan lap yang telah dilembabkan menggunakan cairan enzimatis 16. Setelah dikeringkan alat siap digunakan ke pasien atau alat disimpan di rak penyimpanan. 17. Petugas melepaskan APD dan cuci tangan 18. Lakukan Dokumentasi Hal- hal yang harus diperhatikan : • Jangan merendam konektor, adaptor probe dan pegangannya dalam cairan apapun • Jangan merendam probe endoscope dalam larutan yang mengandung alcohol, pemutih, senyawa ammonium chlorida • Tidak boleh disterilkan dengan steam autoclave
UNIT TERKAIT	1. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Unit Kerja lainnya. 2. Sterilisasi Sentral
DOKUMEN TERKAIT	1. Formulir uji efektivitas cairan DTT 2. Formulir penatalaksanaan alat TEE