


	PENGOPERASIAN ALAT COBAS E-411		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/7863/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 09 September 2024	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta \${ttd} dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Merupakan alat yang digunakan untuk analisis Immunoserologi.		
TUJUAN	Sebagai acuan Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) dalam mengoperasikan alat Cobas E-411		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	<i>Instrument</i> diletakkan di tempat yang bersih Suhu ruangan harus dingin atau ber-AC (20-25°C) A. Menyalakan Alat Cobas E-411 1. Memastikan UPS bekerja dengan baik dan menekan Power “ON” 2. Membuka tutup botol ProCell dan <i>CleanCell</i> 3. Melakukan maintenance harian / mingguan (2 mingguan) / memerlukan <i>maintenance</i> 4. Menghidupkan instrument, menaikkan Power “ON” (samping kanan), kemudian menekan Power “ON” (depan) 5. Memasukkan user dan password (User : Lab, password : LAB) 6. Instrument akan melakukan inisialisasi 7. Mengeluarkan reagen dari lemari pendingin, membiarkan mencapai suhu kamar selama ±30 menit 8. Memeriksa cairan pencuci (<i>system water</i> , <i>syswash</i> + <i>aquabidest</i> → 1 + 100), limbah padat, limbah cair dan <i>consumable</i> (PC/CC, <i>assay cup</i> , <i>assay tip</i>) 9. Sebelum memasukkan reagen ke dalam reagen disk, cek adanya gelembung di reagen (hilangkan bila perlu), kemudian memasukkan reagen ke dalam reagent disk dan lakukan <i>reagent scan</i> B. Mematikan Alat Cobas E-411 1. Jika status instrument berubah menjadi <i>Standby</i> , hal ini berarti <i>instrument</i> sudah melakukan finalisasi secara otomatis 2. Tetapi jika instrument dihentikan operasinya / <i>S.Stop</i> → <i>Standby</i> dengan menekan tombol stop, maka sebelum mematikan <i>instrument</i> harus melakukan <i>Finalization maintenance</i> secara manual, melalui menu : <i>utility</i> → <i>maintenance</i> → <i>finalization maintenance</i> → select → ok 3. Setelah <i>standby</i> , keluarkan semua reagen dari reagen disk dan memasukkan ke lemari pendingin. 4. Tutup botol PC/CC <i>Log off</i> → memilih <i>shutdown</i> → ok. Tunggu sampai layar monitor menjadi gelap / mati dan lampu monitor juga mati 5. Mematikan <i>power</i> bagian depan, melanjutkan dengan mematikan <i>power</i> bagian samping kanan		
UNIT TERKAIT	1. Tim Kerja Pelayanan Penunjang (Teknisi Atem) 2. IPSRS (Teknisi Listrik) 3. Pihak Eksternal (Teknisi Vendor Alat)		

ALUR MENYALAKAN ALAT COBAS E-411

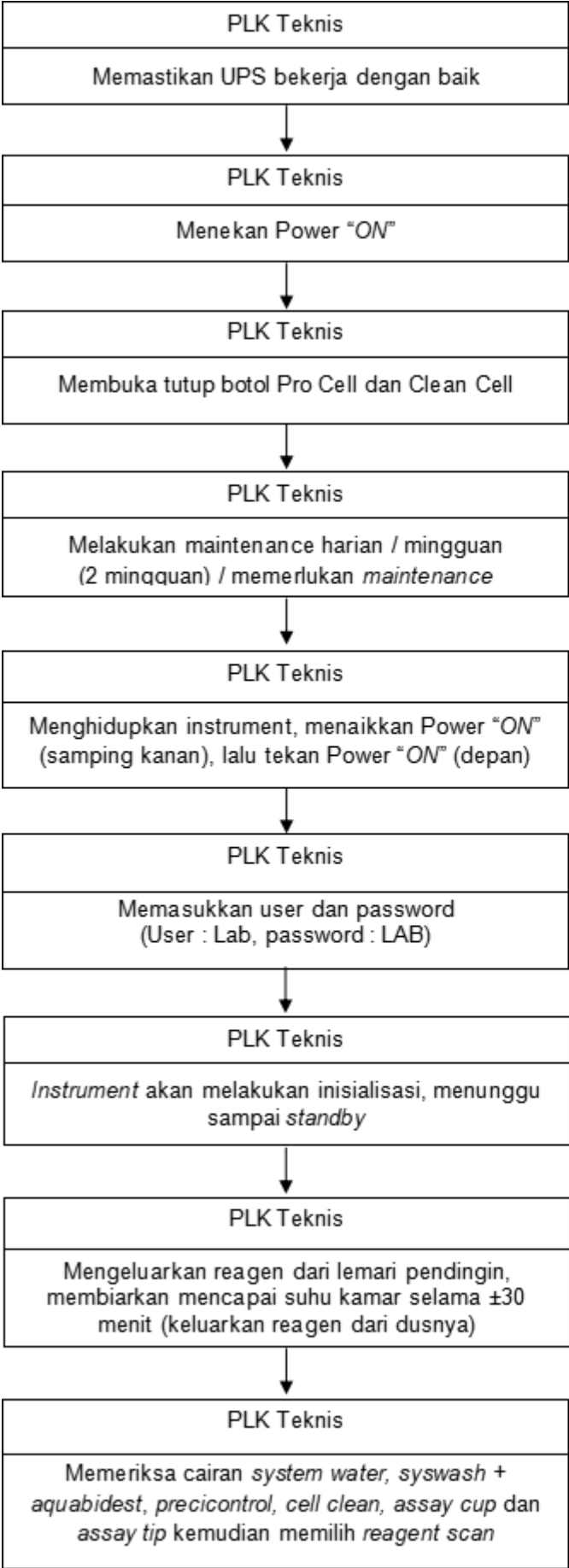

ALUR MEMATIKAN ALAT COBAS E-411



	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/7863/2024
		Tanggal Efektif	: 09 September 2024
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 31 Juli 2024

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen
☒ Perubahan Dokumen
☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
NIP. 198605282012122001

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	-	-	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium. 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah. 3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar 4. Saat ini belum ada kebijakan yang mengatur	-	Dokumen baru