

 <p>Rumah Sakit Pusat Otak Nasional</p>	PEMBERSIHAN BARANG MEDIS KOTOR MENGGUNAKAN MESIN WASHER		
	Nomor Dokumen : BT.02.02/XXXIX.1/ 2318/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 <p>Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP 196209131988031002</p>	
PENGERTIAN	Pembersihan barang medis kotor menggunakan mesin washer adalah proses menghilangkan atau membersihkan barang-barang yang mungkin terkontaminasi oleh mikroba dan kotoran atau noda yang melekat pada barang medis yang kotor dengan menggunakan mesin washer desinfektor.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah penyebaran infeksi sehingga aman digunakan pada proses selanjutnya. 2. Untuk mencegah / menghindari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebersihan alat / instrumen 		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.1/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	<p>Pencucian dengan Mesin Washer automatic Desinfector</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD. 2. Instrumen yang diantar ke Sterilisasi Sentral sudah di pre cleaning di ruangan dan dalam kondisi lembab (<i>moist</i>). 3. Nyalakan mesin washer desinfektor, buka kran supply air, dan cek stock enzymatic dan desinfektan mesin washer. 4. Lakukan uji monitoring cleaning setiap seminggu sekali. 5. Lepaskan sambungan / rangkaian pada alat bila ada. 6. Buka pintu mesin washer, susun instrument didalam rak mesin washer. 7. Pilih program pencucian dengan mesin washer sesuai dengan instruksi mesin dan instruksi instrument. 8. Setelah selesai proses, lakukan pengeringan instrument dengan udara bertekan, kain lap tanpa serat atau mesin pengering. 9. Lakukan uji visual, bila alat masih kotor lakukan proses pencucian dari awal. 10. Bila strip indikator monitoring cleaning tidak berubah berarti hasil pencucian tidak maksimal, segera laporkan ke penanggung jawab sterilisasi, dan lakukan pencucian ulang dengan mesin washer lain, atau manual. 11. Lakukan serah terima alat bersih kepetugas pengemasan. 12. Lepas APD, lalu cuci tangan. 13. Lakukan dokumentasi. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sterilisasi Sentral. 2. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Ruang Perawatan/ unit kerja lainnya. 		
DOKUMEN TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Catatan Dekontaminasi Alat. 2. Formulir permintaan sterilisasi instrumen barang re-use. 		