

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PELIPATAN DAN PENGEMASAN LINEN		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXI.I /16676/2019	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 18 Oktober 2019	Ditetapkan : Direktur Utama,  Dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002	
PENGERTIAN	Tata cara pelipatan dan pemengemasan linen untuk kebutuhan ruang operasi.		
TUJUAN	Memudahkan penggunaan linen di ruang operasi, ruangan intensive, dan rawat inap.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/16583/2019, tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD. 2. Linen diantar ke sterilisasi sentral sudah dalam kondisi bersih. 3. Linen dari rawat inap dan ruang intensive dikemas sesuai formulir permintaan steril. 4. Linen dari kamar operasi di set dan dikelompokkan berdasarkan jumlah linen yang diantar 5. Jenis set/ Pack untuk kamar operasi sebagai berikut : a. Jas Operasi Prosedur : - Lipat jas dengan membalikkan sisi dalam menjadi di luar, sampai batas pundak dengan posisi lengan kedalam, - ikatkan tali jas dengan cara menyimpul, - lipat sisi <i>vertical</i> jas menjadi 3 lipatan panjang, kemudian - lipat sisi <i>horizontal</i> jas menjadi 4 lipatan kecil. - Kemas Jas operasi sesuai permintaan ruangan b. Duk Laminek - Dilipat memendek terbalik - Lipat Duk menjadi 4 lipatan kecil c. Duk Cranio - Dilipat memendek terbalik - Lipat Duk menjadi 4 lipatan kecil d. Duk Shunting - Dilipat memendek terbalik - Lipat Duk menjadi 4 lipatan kecil		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PELIPATAN DAN PENGEMASAN LINEN		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXI.I /16676/2019	No. Revisi : 00	Halaman : 2/2
PROSEDUR	e. Duk CVC - Dilipat memendek terbalik - Lipat menjadi 3 lipatan sedang f. Duk Besar - Dilipat memendek terbalik - Lipat menjadi 3 lipatan sedang g. Duk Sedang - Dilipat memendek terbalik - Lipat menjadi 3 lipatan kecil h. Duk Kecil - Dilipat memendek terbalik - Lipat menjadi 3 lipatan kecil - Lipatan terakhir membentuk segitiga i. Duk Cathlab - Dilipat memendek terbalik - Lipat menjadi 3 lipatan sedang j. Sarung Mayo - Dilipat memendek terbalik - Lipat menjadi 4 lipatan sedang k. Duk Kursi - Dilipat memendek terbalik - Lipat menjadi 2 lipatan kecil l. Duk Spinal - Dilipat memendek terbalik - Lipat menjadi 2 lipatan kecil 6. Kemas sesuai kebutuhan, sematkan indikator internal didalamnya 7. Lepaskan APD dan cuci tangan.		
UNIT TERKAIT	1. Sterilisasi Sentral 2. Instalasi Bedah Sentral 3. Intensive Care 4. Rawat Inap dan Rawat Jalan		
DOKUMEN TERKAIT	1. Formulir Permintaan Sterilisasi 2. Formulir Inspeksi Linen		