

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PROSES PENGELOLAAN INSTRUMENT SINGLE USE YANG DI RE USE		
	Nomor Dokumen : OT.01.01/XXXIX.I/ 2323/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Instrument single use adalah suatu alat/ instrument yang sebagian atau keseluruhan komponen diperuntukkan untuk sekali pakai, akan tetapi dalam pengadaan alat susah didapat dan harga mahal, maka instrument tersebut di proses ulang sesuai dengan standar.		
TUJUAN	1. Memberikan jaminan bahwa instrument tersebut aman dipakai untuk pasien. 2. Menurunkan biaya RS dalam penyediaan alat kesehatan 3. Memelihara efektifitas dan mutu alat kesehatan steril 4. Mengurangi resiko infeksi 5. Meningkatkan masa pakai alat kesehatan		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD. 2. Lakukan proses pre cleaning di instalasi terkait. 3. Tempatkan instrument dalam box tertutup. 4. Kirim instrument ke sterilisasi sentral dengan box tertutup, diletakkan diatas trolley, dan di transportasi lewat akses lift kotor. 5. Lakukan serah terima dan uji visual di area serah terima instrument kotor. 6. Menyerahkan dan menandatangani formulir permintaan re use dan kartu monitoring re use yang sudah ditandatangani dokter dan perawat. 7. Proses Dekontaminasi. i. Memisahkan instrument single use dengan instrument re use. ii. Merendam instrument single use di bak perendaman. iii. Menentukan metode Cleaning instrument single use. a. Menggunakan mesin ultrasonic sesuai instruksi pabrikan, untuk instrument berlubang dan mikro b. Menggunakan Mesin washer disinfector sesuai instruksi pabrikan dan jenis instrument. c. Pencucian manual sesuai instruksi pabrikan, atau tingkat kebersihannya tidak maksimal menggunakan mesin automatic. iv. Membilas instrument dengan menggunakan air RO (reverse osmosis). v. Keringkan dengan udara bertekanan, kain lap tanpa serat, dan spuit untuk instrument tertentu dengan metode pengeringan system vacuum. vi. Lakukan uji visual sebelum instrument diserahkan ke area pengemasan. vii. Melakukan dokumentasi viii. Serahkan instrument single use beserta formulir dan kartu monitoring melalui loket serah terima.		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		PROSES PENGELOLAAN INSTRUMENT SINGLE USE YANG DI RE USE																														
Nomor Dokumen :		No. Revisi : 00	Halaman : 2/4																													
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002																														
	8. Keringkan kembali instrument re use dengan menggunakan mesin drying terutama instrument yang berlubang. 9. Lakukan pengeringan ulang jika tingkat kekeringan belum maksimal. 10. Beri gelang penanda re use <table><tr><th>NO</th><th>KODE WARNA</th><th>PROSES</th></tr><tr><td>1</td><td>HIJAU</td><td>Re Use 1 kali (R-1)</td></tr><tr><td>2</td><td>BIRU</td><td>Re Use 2 kali (R-2)</td></tr><tr><td>3</td><td>KUNING</td><td>Re Use 3 kali (R-3)</td></tr><tr><td>4</td><td>MERAH</td><td>Re Use 4 kali (R-4)</td></tr><tr><td>5</td><td>HITAM</td><td>Re Use 5 kali (R-5)</td></tr><tr><td>6</td><td>MERAH MUDA</td><td>Re Use 6 kali (R-6)</td></tr><tr><td>7</td><td>UNGU</td><td>Re Use 7 kali (R-7)</td></tr><tr><td>8</td><td>PUTIH</td><td>Re Use 8 kali (R-8)</td></tr><tr><td>9</td><td>ORANGE</td><td>Re Use 9 kali (R-9)</td></tr></table> 11. Kemas instrument dan masukkan indikator internal kedalam kemasan sesuai dengan permintaan proses sterilisasi yang ada di formulir re use. 12. Tempelkan label tanggal expired date sekaligus indikator external. 13. Tulis kode ruangan dan nomor formulir di kemasan instrument pada posisi bukaan atas kemasan bagian belakang. 14. Lakukan dokumentasi 15. Lakukan proses sterilisasi dengan menyertakan BI sebagai jaminan proses steril. 16. Setelah proses steril selesai lakukan kondensasi. 17. Lakukan dokumentasi. 18. Lakukan uji visual. 19. Masukkan ampul BI kedalam incubator untuk di uji. 20. Lakukan dokumentasi. 21. Tulis nomor lot yang terdapat di kartu monitoring re use dengan spidol permanent pada kemasan re use, dengan posisi penulisan sisi plastik pouches didekat bukaan atas. 22. Steples kemasan instrument single use dekat bukaan atas dengan kartu monitoring re use. 23. Simpan instrument re use di area penyimpanan beserta formulir 24. Lakukan dokumentasi 25. Lepaskan APD dan cuci tangan.			NO	KODE WARNA	PROSES	1	HIJAU	Re Use 1 kali (R-1)	2	BIRU	Re Use 2 kali (R-2)	3	KUNING	Re Use 3 kali (R-3)	4	MERAH	Re Use 4 kali (R-4)	5	HITAM	Re Use 5 kali (R-5)	6	MERAH MUDA	Re Use 6 kali (R-6)	7	UNGU	Re Use 7 kali (R-7)	8	PUTIH	Re Use 8 kali (R-8)	9	ORANGE
NO	KODE WARNA	PROSES																														
1	HIJAU	Re Use 1 kali (R-1)																														
2	BIRU	Re Use 2 kali (R-2)																														
3	KUNING	Re Use 3 kali (R-3)																														
4	MERAH	Re Use 4 kali (R-4)																														
5	HITAM	Re Use 5 kali (R-5)																														
6	MERAH MUDA	Re Use 6 kali (R-6)																														
7	UNGU	Re Use 7 kali (R-7)																														
8	PUTIH	Re Use 8 kali (R-8)																														
9	ORANGE	Re Use 9 kali (R-9)																														
PROSEDUR																																
UNIT TERKAIT	1. Sterilisasi Sentral. 2. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Ruang Perawatan/ unit kerja lainnya																															



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PROSES PENGELOLAAN INSTRUMENT SINGLE USE YANG DI RE USE

Nomor Dokumen : No. Revisi :

01

Halaman :

3/4

ALUR PROSES SINGLE USE YANG DI RE USE

Aktivitas	Dokumen/ Catatan Mutu	Keterangan
Mulai ↓ Dokter terakhir pengguna alat Mengisi Kartu Persetujuan Proses sterilisasi Barang Single Use, menandatangani dan menyerahkan pada perawat ↓ Perawat Pengelompokan alat berdasarkan proses re use, mengisi Kartu Persetujuan Sterilisasi, melakukan Pre Cleaning, memasang warna dan mengantar barang kotor ke Sterilisasi Sentral ↓ Petugas Sterilisasi Sentral Menerima alat kotor dan melakukan proses cleaning, pengemasan, penandaan re use dan sterilisasi serta menandatangani kartu persetujuan ↓ Petugas Unit Kerja Mengambil alat steril di Sterilisasi Sentral dan menyimpan di Unit Kerja untuk digunakan kembali ↓ Selesai	Kartu Persetujuan Proses Sterilisasi barang Single Use Kartu Persetujuan Proses Sterilisasi barang Single Use Kartu Persetujuan Proses Sterilisasi barang Single Use dan Formulir Permintaan Sterilisasi Kartu Persetujuan Proses Sterilisasi barang Single Use dan Formulir Permintaan Sterilisasi	Keputusan barang single use boleh di re use dilakukan oleh dokter yang terakhir menggunakan alat. Keputusan di tandai dengan tanda tangan serta nama dokter Petugas Sterilisasi Sentral berwenang untuk merekomendasikan kepada Unit Kerja kalau alat tidak layak pakai atau penandaan tidak terpasang Prosedur penggunaan kembali harus di informasikan kepada pasien oleh dokter di Unit Kerja



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PROSES PENGELOLAAN INSTRUMENT SINGLE USE YANG DI RE USE

Nomor Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

01

4/4

DOKUMEN TERKAIT

1. Formulir permintaan sterilisasi instrumen barang re-use.
2. Kartu monitoring single use yang di re use.
3. Formulir permintaan sterilisasi instrumen barang re-use.
4. Kartu monitoring single use yang di re use.
5. Formulir pencucian instrument
6. Formulir uji swab protein
7. Formulir monitoring mesin
8. Formulir monitoring BI
9. Formulir uji visual
10. Kesalahan distribusi