



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PENGOPERASIAN ALAT RAYTO RT-6500

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

BT-02-02 / 111 1622/2017

3/3

C. Mencetak Hasil

1. Pilih menu "**Result R**" pada monitor.
2. Klik "**Report by Item**" untuk mencetak hasil dalam berdasarkan *item* yang ada dalam pemeriksaan.
3. Klik "**Report by Pasien**" untuk mencetak hanya hasil milik pasien.
4. Klik "**Report by Plate**" untuk mencetak hasil dalam format yang sama dengan *plate*.
5. Pilih *item name* yang akan dicetak misal HSV-1 M
6. Klik "**Preview (P)**" lalu klik simbol "**Print**"
7. Jika hasil sudah tercetak, pilih "**Exit**"

D. Mematikan Alat

1. Pilih "**Close Window**" untuk keluar dari aplikasi pemeriksaan.
2. Matikan komputer dengan mengklik "**Shut Down**", lalu matikan CPU.
3. Setelah itu, matikan alat dengan menekan tombol power dibagian belakang sebelah kiri alat.

UNIT TERKAIT

Seluruh instalasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PENGOPERASIAN ALAT RAYTO RT-6500

No. Dokumen :

OT-02.02/ 11 / 1022 / 2017

No. Revisi :

Halaman :

2/3

6. Isi "**Item List**" sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan misal HSV-1 IgM.
7. Isi peta *well* pada *template plate* yang tersedia, sesuai dengan *well* yang di *running*.

Set Sample Type :

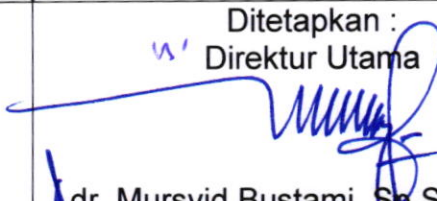
Pemeriksaan Antibodi IgM

CR		Kalibrator
PC		Positif Kontrol
NC		Negatif Kontrol
Sample		Sampel Pasien

Pemeriksaan Antibodi IgG

SD 1		Kalibrator 3
SD 2		Kalibrator 2
SD 3		Kalibrator 1
PC		Positif Kontrol (dijadikan sampel)
NC		Negatif Kontrol (dijadikan sample)
Sample		Sampel Pasien

8. Tekan "**Clear**" untuk menghapus
9. Setelah selesai mengisi peta *plate*, klik "**Move Out**" untuk mengeluarkan rak *plate*.
10. Masukkan *plate* dengan posisi yang tepat pada alat (sesuaikan dengan tanda A1).
11. Klik "**Test**", lalu alat akan membaca *well*.
12. Setelah keluar hasil pada monitor, klik "**Save S**" lalu "**Exit**".

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENGOPERASIAN ALAT RAYTO RT-6500		
	No. Dokumen : <i>07-07-02/111102242019</i>	No. Revisi :	Halaman : 1/3
SPO	Tanggal Terbit : <i>6 Maret 2019</i>	Ditetapkan : <i>W</i> Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Prosedur baku yang memuat tata cara pengoperasian alat pemeriksaan imunologi metode ELISA yaitu RAYTO RT-6500.		
TUJUAN	Sebagai panduan pranata laboratorium dalam mengoperasikan alat pemeriksaan pemeriksaan imunologi metode ELISA, RAYTO RT-6500 dari menghidupkan alat, melakukan pengerjaan sampel, mencetak hasil sampai mematikan alat.		
KEBIJAKAN	Instalasi Laboratorium		
PROSEDUR	A. Menghidupkan Alat 1. Menyambungkan saklar UPS ke saklar listrik. 2. Menghidupkan komputer 3. Menyalakan alat RAYTO RT-6500 dengan menekan power pada bagian belakang kiri alat. B. Melakukan Pengerjaan Sampel 1. Membuka Program “ELISA manage software of Rayto” pada monitor. 2. Pilih Name , lalu isi sesuai ID 3. Masukkan password, lalu alat akan melakukan <i>system check</i> secara otomatis. 4. Pilih Menu “Pasient P” , kemudian isi data pasien seperti No. Lab, nama, jenis kelamin. Setelah selesai klik <i>Exit</i> . 5. Pilih menu “Test Sample T”		