


 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PROSEDUR MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN ALAT ECHOCARDIOGRAPHY		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
	01/01/2018/XXXIX-1/3650.512/2018	00	1/2
SPO	Tanggal Terbit : 30 April 2018	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Menghidupkan dan mematikan alat <i>Echocardiography</i> adalah salah satu cara untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan fungsi alat <i>Echocardiography</i> .		
TUJUAN	Agar tidak terjadi kesalahan urutan dalam prosedur menyalakan dan mematikan alat		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor : HK.02.04/II/2608/2016 tentang Pedoman Pelayanan Neurodiagnostik		
PROSEDUR	<p>A. Peralatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabel rol 2. Mesin <i>Echocardiography</i> <p>B. Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek jadwal pemeriksaan <i>Echocardiography</i> 2. Rapikan ruangan <i>Echocardiography</i> 3. Pastikan AC tetap dalam keadaan menyala <p>C. Pelaksanaan</p> <p>Menghidupkan alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungkan kabel alat dengan stop kontak 2. Tekan tombol "On" pada bagian bawah belakang mesin, kemudian tekan tombol "Power On" pada unit, kurang lebih tunggu selama dua detik sampai muncul tampilan menu pada monitor. <p>Mematikan alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan tombol "Power Off", tunggu hingga muncul tampilan menu pilihan, pilih klik "SHUT DOWN", tunggu beberapa saat hingga layar monitor benar-benar mati. 2. Setelah layar mati lalu matikan mesin dengan menekan tombol "Off" pada bagian bawah belakang mesin. 3. Cabut kabel dari stop kontak. 4. Rapikan kabel agar mencegah dari terindas roda alat saat memindahkan alat. 		

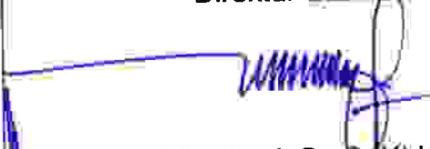

**Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional**

**PROSEDUR MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN ALAT
ECHOCARDIOGRAPHY**

No. Dokumen :

No. Revisi :
00

Halaman :
2/2

Hal yang perlu diperhatikan :

1. Pastikan stop kontak terpasang dengan benar dan tidak longgar.
2. Pastikan selalu kabel *Probe Echocardiography* tidak menjulur ke lantai.

Unit Terkait :

1. Ruang Neurodiagnostik
2. Elektromedik