

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PEMBERSIHAN BARANG MEDIS KOTOR SECARA MANUAL		
	Nomor Dokumen : OT.02.03/XXXIX.I/ 2308/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Pembersihan barang medis kotor secara manual adalah proses menghilangkan kotoran dan material organis yang melekat pada instrumen medis yang kotor.		
TUJUAN	1. Mencegah penyebaran infeksi sehingga aman digunakan pada proses selanjutnya. 2. Melindungi petugas yang menangani instrumen.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD. 2. Instrumen yang diantar ke Sterilisasi Sentral sudah di pre cleaning di ruangan dan dalam kondisi lembab (<i>moist</i>). 3. Lepaskan sambungan pada alat bila ada. 4. Instrumen direndam dalam bak perendaman atau sink yang berisi desinfektan atau enzimatik sesuai dosis pengenceran dan waktu perendaman. 5. Lakukan penyikatan instrumen dibawah permukaan air. 6. Bilas instrumen dengan air mengalir, bila masih ada kotoran yang menempel lakukan penyikatan ulang sampai noda hilang. 7. Untuk instrument berlumen periksa ada tidaknya sumbatan atau kebocoran. 8. Saat pembilasan gunakan air bertekanan untuk menghilangkan kotoran dan serpihan-serpihan yang terdapat pada sela-sela instrumen. 9. Instrumen dikeringkan dengan udara bertekan, kain lap tanpa serat dan mesin pengering. 10. Lakukan uji visual, bila alat masih kotor lakukan proses pencucian dari awal. 11. Lakukan validasi hasil cleaning secara random sampling dengan menggunakan protein test setiap seminggu sekali. 12. Bila hasil pemeriksaan positif, lakukan pencucian ulang. 13. Lakukan serah terima alat bersih kepetugas pengemasan. 14. Lepas APD, kemudian cuci tangan. 15. Lakukan dokumentasi.		



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PEMBERSIHAN BARANG MEDIS KOTOR SECARA MANUAL

Nomor Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

01

2/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit

28 Maret 2018

Ditetapkan :
Direktur Utama,

dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

UNIT TERKAIT

1. Sterilisasi Sentral.
2. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Ruang Perawatan/ unit kerja lainnya.

DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Catatan Dekontaminasi Alat.
2. Formulir permintaan sterilisasi instrumen barang re-use.