

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PEMERIKSAAN PRE-OPERATIONAL CHECK DEFIBRILLATOR PHILIPS DFM100		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/9645 /2023	No. Revisi: 00	Halaman: 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit: 16 Oktober 2023	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., M.A.R.S.	
	PENGERTIAN	Defibrillator merupakan salah satu alat life support yang digunakan untuk memberikan kejutan listrik dengan tujuan mengembalikan irama detak jantung agar menjadi normal kembali pada pasien yang mengalami gagal jantung.	
TUJUAN	1. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien / <i>patient safety</i> 2. Memastikan alat kesehatan yang digunakan selalu dalam keadaan ready to use ketika dalam kondisi <i>emergency</i>		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Fasyankes, 2015		



**Rumah Sakit Pusat
Otak Nasional Prof. Dr.
dr. Mahar Mardjono
Jakarta**

**PEMERIKSAAN PRE-OPERATIONAL CHECK
DEFIBRILLATOR PHILIPS DFM100**

No. Dokumen:

OT.02.02/D.XXIII/9645
/2023

No. Revisi:

00

Halaman:

2/2

PROSEDUR

Prosedur pre operational check dilakukan untuk cek defibrilasi, ecg, pacing, spo2, NBP, dan printer.

1. Putar knob ke posisi ON, tekan menu – others – operational check – run op check – yes – ikuti instruksi pada layar display.
2. Putar knob ke posisi 170J
3. Putar knob ke posisi 150J, lalu tekan tombol charge, tunggu sampai instruksi discharge pada tombol di paddle
4. Audio test, apakah mendengar suara shock delivery? (yes)
5. Tekan tombol Sync. (passed)
6. Therapy delivery test, untuk cek paddle. (passed)
7. Lead ECG test, untuk cek aksesoris ekg. (passed)
8. Pads ECG test. (passed)
9. Battery test. (passed)
10. Printer test. (passed)
11. Hasil print out pre operational check akan keluar melalui printer. Jika hasil pre operational check, all passed. Maka, alat berfungsi dengan baik.
12. Dokumentasikan hasil print out didalam buku pemeriksaan rutin alat defibrillator yang dilakukan setiap hari oleh perawat.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Intensive Care
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
5. Instalasi Bedah Sentral