

 <p>Rumah Sakit Pusat Otak Nasional</p>	PRE CLEANING		
	Nomor Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
	070202/XXXIX.1/ 2520/2018	00	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 <p>Ditetapkan : Direktur Utama dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002</p>	
PENGERTIAN	Pre cleaning adalah proses pengelolaan instrument kotor se-segera mungkin di tempat penggunaan dengan cara membilas menggunakan air mengalir/ menggunakan foam.		
TUJUAN	Untuk menghindari terjadinya infeksi silang dan mencegah timbulnya karat/ korosi pada alat.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuci tangan kemudian gunakan APD. 2. Buang sampah bahan medis habis pakai dan benda tajam (misal: jarum jahit dan Sputit) yang terdapat pada instrument. 3. Lepas rangkaian instrument jika ada (perhatikan bila ada instruksi khusus dari pabrikan). 4. Bilas instrument dibawah permukaan air mengalir untuk menghilangkan sisa cairan tubuh pasien, dan sisa antiseptik (Iodine). 5. Instrumen yang tajam harus dipisahkan dari instrument lain dengan menggunakan wadah yang tahan tusukan. 6. Apabila ada alat mikro harus ditempatkan tersendiri untuk mencegah kerusakan alat/ hilang. 7. Bila ada alat yang memerlukan perbaikan, harus dipisahkan dan diberi tanda/ label. 8. Letakkan instrument di dalam box kontainer kotor, kemudian kirim ke sterilisasi sentral. 9. Apabila alat tidak dikirim segera ke sterilisasi sentral dapat menggunakan foam untuk menjaga kelembaban alat, dengan cara menyemprotkan foam ke seluruh permukaan instrument. 10. Lepaskan APD, kemudian cuci tangan. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sterilisasi Sentral. 2. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Ruang Perawatan/ unit kerja lainnya. 		
DOKUMEN TERKAIT	Formulir permintaan sterilisasi instrumen re-use.		