


 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PEMERIKSAAN OPERASIONAL DEFIBRILLATOR DFM100 PHILIPS		
	No. Dokumen : OT-02-02/XXXIX.1 17668/2018	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit : 31 OKTOBER 2018	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Prosedur dalam melakukan pengecekan fungsi pada alat Defibrillator DFM100 merk Philips.		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dalam memastikan alat Defibrillator DFM100 merk Philips siap digunakan bila terdapat kejadian kegawatdaruratan medis.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. tentang Panduan <i>Code Blue</i> dan <i>Nursing Early Warning Scoring System</i> .		
PROSEDUR	1. Pastikan alat Defibrillator DFM100 Philips selalu terhubung dengan sumber listrik. 2. Putar knob ke angka 200J sampai alat menyala. 3. Tekan tombol Pilih Menu → Lainnya (tekan) → Pemeriksaan Operasional (tekan) → Jalankan Pemeriksaan Operasional (tekan) → Keluar dari Mode Klinis (pilih Ya) 4. Ikuti Petunjuk yang disebutkan pada alat : a. Putar knob ke angka 170 Joule b. Putar knob ke angka 150 Joule c. Tekan tombol Charge d. Tekan tombol Shock pada kedua Paddle defibrillator e. Tekan dan lepaskan tombol Sync f. Tunggu hingga hasil tes Audio, Paddle Eksternal, Lead EKG, baterai, SpO2, printer pada layar Lulus g. Print hasil, pastikan tertera Lulus pada hasil pemeriksaan setiap elemen uji fungsi. h. Bila terdapat hasil Tidak Lulus, ulang kembali Pemeriksaan Operasional. i. Cek kotak di pojok kanan atas pada alat defibrillator, bila terdapat tanda Silang berwarna Merah, berarti alat belum siap digunakan. Jalankan kembali pemeriksaan operasional atau hubungi teknisi alat. j. Cantumkan tanda tangan pada hasil <i>print out</i>. Tempelkan pada buku pemeriksaan operasional. k. Matikan alat defibrillator. 5. Pemeriksaan operasional defibrillator dilakukan oleh perawat setiap hari. Kelengkapan alat di <i>trolley emergency</i> dicek setiap shift dan didokumentasikan.		
UNIT TERKAIT	1. Tim <i>Code Blue</i> 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Neurorestorasi 5. Bagian Elektromedis		

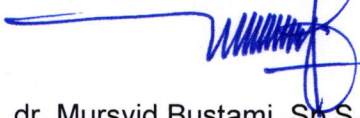

Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PEMERIKSAAN OPERASIONAL DEFIBRILLATOR DFM100 PHILIPS

No. Dokumen :

OT.0202/XXXIX.1/
7668/2018

No. Revisi :

00

Halaman :

2/2

PETUNJUK PEMERIKSAAN OPERASIONAL DEFIBRILLATOR DFM100 PHILIPS RS PUSAT OTAK NASIONAL

Pastikan alat Defibrillator DFM100 Philips selalu terhubung dengan sumber listrik. Putar knob ke angka 200 Joule sampai alat menyala

Tekan tombol Pilih Menu → Lainnya (tekan) → Pemeriksaan Operasional (tekan) → Jalankan Pemeriksaan Operasional (tekan) → Keluar dari Mode Klinis (pilih Ya)

1. Ikuti Petunjuk yang disebutkan pada alat :
 - a. Putar knob ke angka 170 Joule
 - b. Putar knob ke angka 150 Joule
 - c. Tekan tombol Charge
 - d. Tekan tombol Shock pada kedua Paddle defibrillator
 - e. Tekan dan lepaskan tombol Sync
 - f. Tunggu hingga hasil tes Audio, Paddle Eksternal, Lead EKG, baterai, SpO2, printer pada layar Lulus
 - g. Tekan tombol Charge pada kedua Paddle defibrillator
 - h. Tekan dan lepaskan tombol Sync
 - i. Tunggu hingga hasil tes Lead EKG dll pada layar Lulus
 - j. Print hasil, pastikan tertera Lulus pada hasil pemeriksaan setiap elemen uji fungsi.
 - k. Bila terdapat hasil Tidak Lulus, ulang kembali Pemeriksaan Operasional.
 - l. Cek kotak di pojok kanan atas pada alat defibrillator, bila terdapat tanda Silang berwarna Merah, berarti alat belum siap digunakan. Jalankan kembali pemeriksaan operasional atau

Catatan :

- Pemeriksaan operasional defibrillator dilakukan oleh perawat setiap hari.
- Kelengkapan alat di *trolley emergency* dicek setiap shift dan didokumentasikan.