

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	STERILISASI DENGAN MESIN PLASMA		
	Nomor Dokumen : <i>HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018</i>	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002	
PENGERTIAN	Sterilisasi dengan mesin plasma adalah proses steriisasi instrument medis yang tidak tahan suhu tinggi.		
TUJUAN	1. Membunuh mikroorganisme yang terdapat pada instrument medis yang tidak tahan suhu tinggi. 2. Menghasilkan instrument medis yang steril.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD. 2. Nyalakan mesin plasma. 3. Siapkan instrumen yang akan disteril, susun dalam tray dalam keadaan berdiri sejajar/ miring (jangan ditumpuk) untuk kemasan pouches, dan mendatar untuk instrument dalam tray/ kontainer, 4. Jumlah instrument medis disesuaikan dengan kapasitas tray. 5. Lakukan uji fungsi mesin plasma sebelum loading proses. 6. Jika hasil uji fungsi bagus, buka pintu mesin plasma. 7. Lakukan uji BI (Biologycal Indikator) seminggu sekali dengan cara disertakan dengan instrument yang akan di steril. 8. Masukkan instrumen yang akan disteril ke dalam mesin plasma. 9. Pilih program sterilisasi plasma sesuai dengan jenis dan kapasitas mesin plasma. 10. Start Proses steril, setelah selesai, tunggu 15-30 menit untuk menghilangkan sisa racun gas H2O2. 11. Buka pintu mesin plasma, keluarkan instrumen yang sudah selesai di steril. 12. Tutup kembali kembali pintu mesin plasma. 13. Serahkan Ampul BI untuk di uji di mesin inkubator . 14. Lepas APD, kemudian cuci tangan. 15. Lakukan dokumentasi		
UNIT TERKAIT	1. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Unit Kerja lainnya. 2. Instalasi strilisasi dari luar rumah sakit.		
DOKUMEN TERKAIT	1. Formulir permintaan sterilisasi instrument re-use 2. Formulir proses sterilisasi plasma 3. Formuli BI (Biologycal Indikator) plasma		