

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PERAWATAN MESIN WASHER DESINFEKTOR		
	Nomor Dokumen : OTD2.02/XXXIX.2/2328/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002	
PENGERTIAN	Perawatan mesin washer desinfektor adalah perawatan rutin yang dilakukan untuk membersihkan chamber internal dan assesories mesin.		
TUJUAN	1. Unruk menjaga kebersihan chamber internal mesin dari karat karena sisa air, dan deterjen (desinfektan+enzymatic) saat proses. 2. Memperpanjang umur pakai mesin. 3. Mengurangi resiko instrument terkontaminasi karat dan lumpur dari sisa proses.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD. 2. Lakukan perawatan rutin minimal 1x dalam seminggu, sesuai prosedur. a. Matikan power supply listrik mesin washer b. Buka pintu mesin washer c. Keluarkan rak dari dalam chamber mesin. d. Keluarkan filter saringan air yang ada didalam chamber mesin washer. e. Siapkan sikat, kanebo, cairan penghilang karat/ kotoran dan air bersih untuk membilas. f. Bersihkan permukaan chamber dengan sikat dan cairan pembersih kemudian bilas dengan air. g. Bersihkan filter saringan air di tempat terpisah dengan sikat dan cairan penghilang karat/ kotoran, kemudian bilas dengan air h. Lepaskan rangkaian rak chamber dan lengan arm spray nya. i. Bersihkan rak chamber di tempat terpisah dengan sikat dan cairan penghilang karat/ kotoran, kemudian bilas dengan air. j. Pasang kembali filter saringan air chamber setelah bersih. k. Rangkai kembali rak chamber dan lengan arm spray nya, kemudian masukkan ke dalam chamber mesin washer. l. Tutup pintu mesin washer 3. Nyalakan mesin dengan dengan memutar panel MCB ke posisi ON. 4. Start proses washing dengan memilih program short yang bertujuan membilas permukaan chamber secara keseluruhan. 5. Setelah proses selesai, buka pintu mesin washer. 6. Lakukan pengecekan, jika hasil pembersihan sudah maksimal, tutup kembali mesin.		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PERAWATAN MESIN WASHER DESINFEKTOR			
	Nomor Dokumen :	No. Revisi : 01	Halaman : 2/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002		
	PROSEDUR	7. Matikan supply listrik mesin washer dengan memutar panel MCB ke posisi OFF.		
		8. Lakukan dokumentasi.		
		9. Lepaskan APD lalu cuci tangan.		
UNIT TERKAIT	Sterilisasi Sentral.			
DOKUMEN TERKAIT	Formulir perawatan mesin			