


	PENGOPERASIAN ALAT <i>TISSUE PROCESSING DONATELLO</i>		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/5509/2024	No. Revisi : 00	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 12 Juni 2024	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Prosedur penggunaan alat <i>Donatello</i> yang digunakan untuk proses pematangan jaringan.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam menggunakan alat <i>tissue processing Donatello</i>		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	A. Alat 1. <i>Tissue Processing Donatello</i> 2. Kaset 3. <i>Basket</i> B. Bahan 1. Parafin 2. <i>Xylol</i> 3. Alkohol 99% 4. Alkohol 96% 5. Alkohol 70% 6. <i>Aquadest</i> C. Prosedur Penggunaan Alat 1. Kabel <i>power</i> disambungkan dengan sumber listrik, kemudian tekan tombol "<i>power switch</i>" (<i>on</i>) di belakang alat. Alat akan melakukan inialisasi beberapa saat hingga posisi <i>ready</i>. 2. Volume parafin yang ada di tempat penyimpanan parafin (<i>Parafin reservoir</i>) dicek terlebih dahulu. Penambahan dilakukan jika diperkirakan parafin tidak cukup untuk proses yang akan dilakukan. 3. Ikon jendela masuk "<i>Guest</i>" ditekan, kemudian diketikan: Username: PATOLOGI Password: RSPON Tombol ceklis hijau ditekan. 4. Ikon "<i>Start (Start Run)</i>" ditekan untuk memulai <i>processing</i> jaringan. 5. Pada daftar pengolahan "<i>start protocol</i>" dipilih "<i>Routine</i>", tombol hijau di sudut kanan bawah "<i>Start Run</i>" ditekan. 6. Pada menu "<i>Baskets</i>", dipilih berdasarkan jumlah <i>basket</i> yang akan dimasukan. 7. Pada menu "<i>Sampels</i>", diketikan jumlah kaset yang akan diproses. 8. Pada daftar "<i>Protocol timing</i>" dipilih <i>Immediate / Overnight / Weekend / Custom</i> untuk waktu selesai pemrosesan jaringan.		

	PENGOPERASIAN ALAT <i>TISSUE PROCESSING DONATELLO</i>		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/5509/2024	No. Revisi : 00	Halaman : 2/3
PROSEDUR	9. Tombol hijau “<i>Start</i>” pada sudut kanan bawah ditekan, kemudian konfirmasi pemrosesan ditekan tombol “ceklis hijau”. 10. Menu “<i>Open SPC</i>” ditekan, kemudian SPC dibuka dengan cara menarik ke bawah tuas kiri pada alat dan membuka ke atas tuas SPC yang ada ditengah alat. 11. <i>Basket</i> yang sudah diisi kaset dimasukan ke dalam SPC. 12. SPC ditutup dengan cara menarik ke bawah tuas SPC dan menaikan tuas kiri pada alat. Tombol hijau “<i>Continue</i>” ditekan. 13. Alat akan memulai otomatis <i>selfcheck</i>, setelah itu akan secara otomatis memulai pemrosesan. 14. Tombol “ceklis hijau” ditekan untuk konfirmasi pemrosesan. 15. Untuk menyelesaikan <i>processing</i> jaringan, tombol “ceklis hijau” ditekan. 16. Konfirmasi <i>protocol</i> selesai, tombol ceklis hijau “<i>Continue</i>” ditekan. Alat akan mengeringkan SPC. 17. Proses pengeringan SPC selesai, ditekan “<i>Open SPC</i>”. SPC dibuka dengan cara menarik ke bawah tuas kiri pada alat dan membuka ke atas tuas SPC yang ada di tengah alat. 18. <i>Basket</i> yang berisi kaset diambil dari dalam SPC. 19. Kaset dipindahkan ke dalam alat <i>tissue embedding</i>. 20. SPC ditutup dengan cara menarik ke bawah tuas SPC dan menaikan tuas kiri pada alat. Tekan tombol hijau “<i>Continue</i>”. 21. Menu “<i>Start Washing</i>” pada layar ditekan untuk memulai proses <i>washing</i>. 22. Pada tampilan “<i>Start Washing Protocol</i>” dipilih “<i>Wash Def</i>”, setelah itu ditekan tombol ceklis hijau di layar “<i>Start Washing</i>” 23. Menu “<i>Open SPC</i>” ditekan, kemudian SPC dibuka dengan cara menarik kebawah tuas kiri pada alat dan membuka ke atas tuas SPC. 24. <i>Basket</i> dimasukan ke dalam SPC. SPC ditutup dengan cara menarik kebawah tuas SPC dan menaikan tuas kiri pada alat. 25. Tombol hijau “<i>Continue</i>” ditekan, kemudian konfirmasi proses <i>washing</i> ditekan tombol “ceklis hijau”. 26. Proses <i>washing</i> akan mulai otomatis sampai selesai. 27. Konfirmasi proses <i>washing</i> selesai ditekan tombol “ceklis hijau”. 28. Tombol hijau “<i>Continue</i>” ditekan, kemudian ditekan “<i>Open SPC</i>”. SPC dibuka dengan cara menarik kebawah tuas kiri pada alat dan membuka ke atas tuas SPC 29. <i>Basket</i> dikeluarkan dari SPC, kemudian tutup SPC. SPC ditutup dengan cara menarik kebawah tuas SPC dan menaikan tuas kiri pada alat, lalu tombol hijau “<i>Continue</i>” ditekan. 30. Alat akan melakukan <i>selfcheck</i>, setelah selesai akan muncul tampilan menu awal pada alat. 31. Tombol <i>power switch (off)</i> di belakang alat ditekan untuk mematikan alat. 32. Kabel <i>power</i> dicabut dari sumber listrik.		
UNIT TERKAIT	1. Bidang Penunjang (Teknisi Elektromedis) 2. IPSRS 3. Pihak Eksternal (Vendor Alat Cryostat HM 525NX)		

ALUR PENGOPERASIAN ALAT *TISSUE PROCESSING DONATELLO*

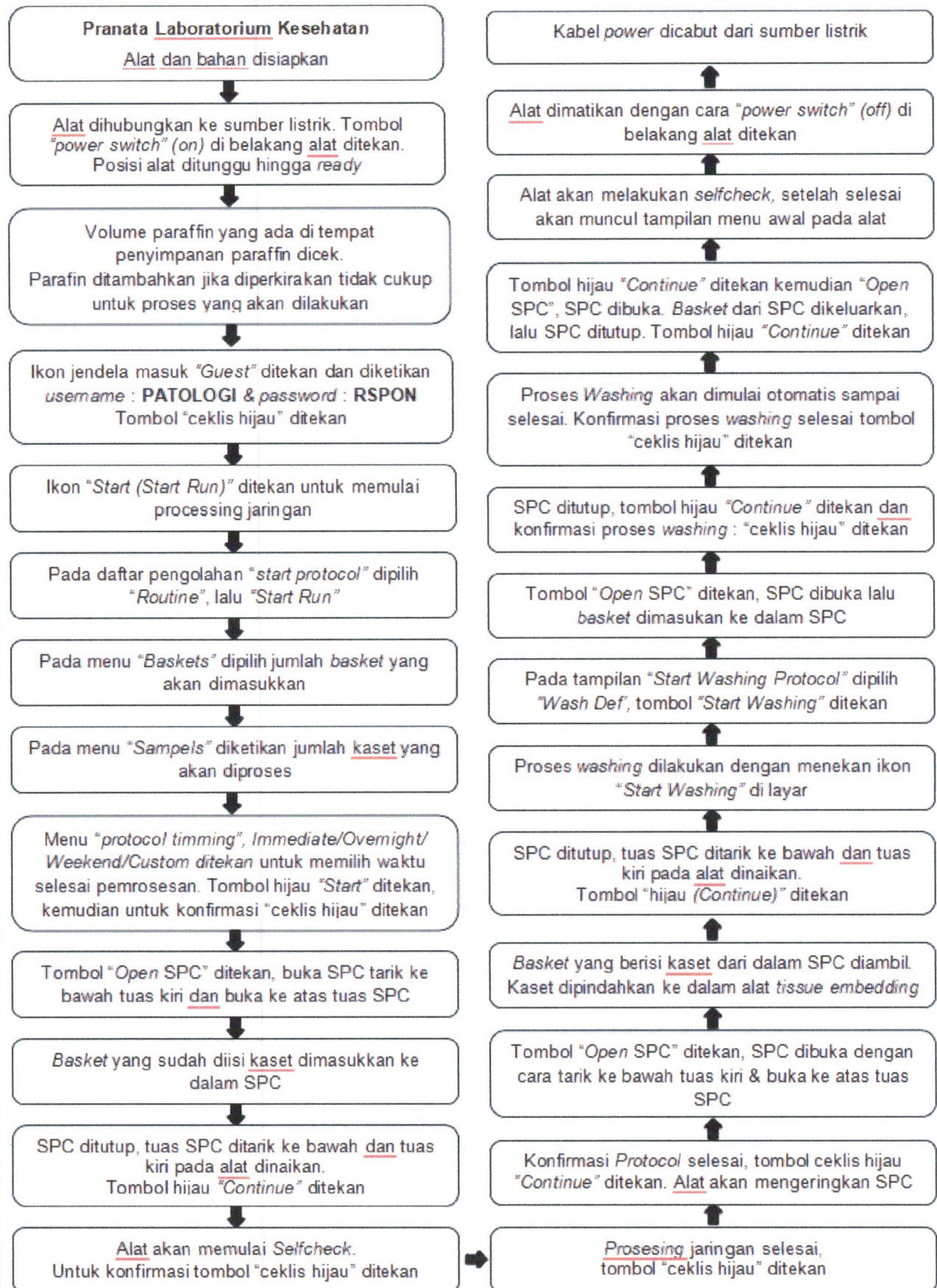


	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/5509/2024
		Tanggal Efektif	: 12 Juni 2024
		Halaman	: 3 (tiga) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 27 Mei 2024 ☐ Penambahan Dokumen
Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA ☒ Perubahan Dokumen
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah ☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ☒ pada kotak yang diperlukan

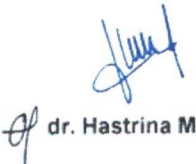TTD PEMOHON

dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	-		1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium. 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah. 3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar 4. Belum diatur dalam dokumen SPO	Belum ada dokumen sebelumnya	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
					Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
					Menyesuaikan format sesuai logo dan kop baru, serta isi prosedur sesuai standar pelayanan di Instalasi Laboratorium dan Bank Darah