


	PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN DG THERM		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/7868/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 09 September 2024	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta \${ttd} dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Merupakan petunjuk pengoperasian dan perawatan DG Therm. DG Therm adalah alat yang berfungsi untuk inkubasi DG Gel Card atau tabung pada suhu ± 37°C.		
TUJUAN	Sebagai pedoman bagi Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) yang bertugas di Bank Darah dalam melakukan pengoperasian dan perawatan DG Therm.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	A. Pengoperasian 1. Menekan power switch ke posisi “ON” pada bagian belakang alat, maka layar akan menampilkan simbol pemanasan awal “--:--” dan simbol “Temperature out of range” akan berkedip (apabila suhu telah tercapai simbol “Temperature out of range” akan menghilang, alarm berbunyi, dan timer 1 dan 2 akan menunjukkan waktu 15 menit) 2. Membuka penutup incubator are (A dan B) yang akan digunakan. Kemudian memasukkan gel cards ke slot kartu. 3. Menutup dan menekan tombol P1 atau P2 untuk memulai inkubasi. 4. Saat proses inkubasi, layar akan menunjukkan sisa waktu inkubasi. Saat inkubasi selesai maka alarm akan berbunyi dan timer akan berkedip. Menekan tombol P1 atau P2 lagi untuk menghentikan timer yang berkedip. Note : Jika timer tidak berhenti saat inkubasi selesai, maka layar akan menampilkan kelebihan waktu, alarm akan berbunyi, dan simbol “Time Exceeded” akan berkedip. 5. Membuka penutup dan mengeluarkan gel cards. B. Perawatan 1. Membersihkan alat setelah digunakan dengan menggunakan kain dan alkohol 70% (jangan menggunakan cairan yang bersifat korosif). 2. Membersihkan debu/cairan pada thermal block dan tray. 3. Melakukan dekontaminasi setiap 1 (satu) bulan sekali. 4. Melepaskan kabel power dari alat apabila alat tidak digunakan.		
UNIT TERKAIT	1. Tim Kerja Pelayanan Penunjang (Teknisi Atem) 2. IPSRS (Teknisi Listrik) 3. Pihak Eksternal (Teknisi Vendor Alat)		

ALUR PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN DG THERM

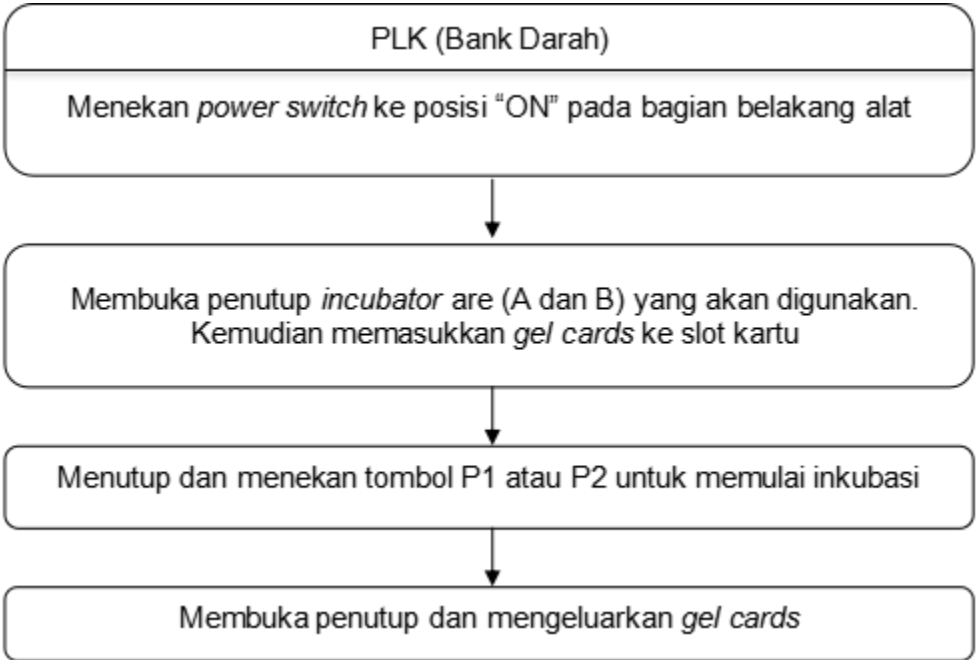

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/7868/2024
		Tanggal Efektif	: 09 September 2024
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 08 Agustus 2024
Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen
☒ Perubahan Dokumen
☐ Pengurangan Dokumen
Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON

dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
NIP. 198605282012122001

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX.I/2920/2018; 05 April 2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/2742/2018	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi unit terkait.