

	PROSEDUR MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN ALAT TRANSCRANIAL DOPPLER		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/1911/2024	No. Revisi : 1	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit: 22 Februari 2024	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Menghidupkan dan mematikan alat <i>Transcranial Doppler</i> (TCD) adalah salah satu cara untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan fungsi alat <i>Transcranial Doppler</i> (TCD)		
TUJUAN	Agar tidak terjadi kesalahan urutan dalam prosedur dalam menyalakan dan mematikan alat TCD		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	<p>A. Persiapan Alat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Set Alat TCD 2. Printer TCD 3. UPS <p>B. Persiapan Petugas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek jadwal pemeriksaan TCD 2. Pastikan kabel sudah terhubung antara alat TCD dengan printer <p>C. Prosedur</p> <p>a. Menyalakan Alat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungkan kabel alat dengan stop kontak 2. Nyalakan UPS dengan menekan tombol "Power On" 3. Pastikan UPS dalam keadaan menyala, tekan tombol "On" pada bagian belakang mesin, kemudian tekan tombol "Power On" pada bagian samping mesin, kurang lebih tunggu selama lima detik sampai muncul tampilan menu pada monitor 4. Double klik icon software "SONARA" pada <i>taskbar</i> 5. Tunggu sampai tanda <i>cecklist</i> hijau muncul pada software 6. Alat siap digunakan <p>b. Mematikan Alat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klik <i>Exit</i> dari software "SONARA" 2. Klik Menu Windows, pilih <i>Power</i> dan klik "SHUTDOWN" 3. Tunggu beberapa saat hingga layar monitor benar-benar mati 4. Setelah layar mati lalu matikan mesin dengan menekan tombol "Power Off" pada bagian belakang mesin 5. Matikan UPS dengan menekan tombol "Power Off" 6. Cabut kabel dari stop kontak 7. Rapihkan kabel agar mencegah dari terlindas roda alat saat memindahkan alat <p>Hal yang perlu diperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan stop kontak terpasang dengan benar dan tidak longgar. 2. Pastikan selalu kabel <i>probe</i> TCD tidak menjulur ke lantai 		

	PROSEDUR MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN ALAT TRANSCRANIAL DOPPLER		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/1911/2024	No. Revisi: 1	Halaman: 2/2
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Rawat Intensive 		