

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN ALAT TRANSCRANIAL DOPPLER RIMED Digi-Lite		
	No. Dokumen: OT.02.02./D.XXIII/ 991/2024	No. Revisi: 00	Halaman: 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit: 28 Mei 2024	Ditetapkan: Direktur Utama \$ttd} dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Transcranial Doppler merupakan pemeriksaan ultrasonografi untuk mengevaluasi aliran pembuluh darah otak. Konsep dasar TCD adalah teknik non invasive untuk mengevaluasi kecepatan, arah dan sifat aliran darah di arteri serebral dengan menggunakan gelombang ultrasonic.		
TUJUAN	1. Mengetahui petunjuk pemeliharaan alat transcranial doppler berupa perawatan dan penyimpanan alat. 2. Memastikan operator pengguna dan teknisi elektromedis melakukan pemeliharaan alat transcranial doppler. 3. Meminimalisasi atau mencegah kerusakan alat yang fatal 4. Memberikan keamanan bagi pasien dan operator pengguna		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Fasyankes, 2015		

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN ALAT TRANSCRANIAL DOPPLER RIMED Digi-Lite		
	No. Dokumen: OT.02.02./D.XXIII/ 991/2024	No. Revisi: 00	Halaman: 2/2
PROSEDUR	Prosedur Perawatan dan Penyimpanan Transcranial Doppler - Membersihkan probe dari gel ultrasound setelah penggunaan ke pasien hanya dengan tisu wajah. - Probe tidak boleh dibersihkan menggunakan alcohol agar permukaan probe tidak terkikis. - Probe tidak boleh terjatuh dan terbentur. - Pastikan peletakkan dan penyimpanan probe pada tempatnya. - Pastikan battery pada keyboard dan mouse sebagai alat pendukung komputer TCD Rimed untuk menjalankan operasional dalam keadaan baik. - Suhu ideal : Saat digunakan : +16°C to +40°C (60.8°F to + 104.0°F) Saat disimpan : -20°C to +70°C (-4°F to + 158°F) Saat dalam pengiriman : -20°C to +70°C (-4°F to + 158°F)		
UNIT TERKAIT	1. Tim Kerja Pelayanan Penunjang 2. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik		
DOKUMEN TERKAIT	User Manual Transcranial Doppler Digi-Lite		

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta		Nomor Dokumen	OT.02.02./D.XXIII/991/2024	
	"Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen"		Tanggal Efektif	28 Mei 2024	
			Halaman	2 halaman	
Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagai berikut :					
Tanggal : 28 Mei 2024			☒ v	Penambahan dokumen	
Nama : dr. Adhy Nugroho, MARS			☐	Perubahan dokumen	
Unit Kerja : Tim Kerja Pelayanan Penunjang			☐	Pengurangan dokumen	
Judul SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN TCD RIMED DIGI-LITE			Beri tanda V pada kotak yang diperlukan		
			(PEMOHON)  dr. Adhy Nugroho Mars		
No	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02./D.XXIII/991/2024	00	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Direktorat Fasyankes, 2015	Penambahan Dokumen SOP Tim Kerja Pelayanan Penunjang	