

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	OPERASIONAL MESIN PEMOTONG KASA		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXIX.1/ 2315/2018	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS(K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Mesin pemotong kasa adalah mesin yang digunakan untuk memotong kasa, sehingga didapat ukuran kasa yang presisi		
TUJUAN	1. Memudahkan petugas dalam memotong kasa 2. Menambah jumlah produksi kasa 3. Menghasilkan kasa potong dengan ukuran yang sama		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.1/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Cuci tangan dan gunakan APD. 2. Siapkan kasa roll yang akan dipotong. 3. Gulung kasa roll menggunakan papan penggulung khusus dengan ukuran papan penggulung : panjang 100cm, lebar 19-20cm. 4. Sambungkan kabel supply listrik mesin pemotong. 5. Nyalakan mesin pemotong kasa. 6. Potong kasa yang telah di gulung, sesuai dengan jenis permintaan kasa. 7. Jika mesin pemotong kasa telah selesai digunakan, matikan mesin dan cabut kabel supply listriknya, kemudian simpan kembali. 8. Lakukan pembersihan dan perawatan mesin pemotong kasa. 9. Lakukan dokumentasi. 10. Lepaskan APD lalu cuci tangan.		
UNIT TERKAIT	Sterilisasi Sentral		
DOKUMEN TERKAIT	1. Formulir pembersihan dan perawatan mesin pemotong kasa. 2. Dokumen hasil produksi kasa.		