

PROSEDUR PEMERIKSAAN CAMPIMETRY



No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/1916/2024

No. Revisi :
1

Halaman :
1/2

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal Terbit:
22 Februari 2024

Ditetapkan:
Direktur Utama

dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS

PENGERTIAN

Pemeriksaan *Campimetry* yaitu serangkaian prosedur mulai dari prosedur menghidupkan alat, prosedur pemeriksaan campimetry atau lapang pandang pada pasien serta prosedur mematikan alat campimetry

TUJUAN

- 1. Agar tidak terjadi kesalahan urutan dalam prosedur saat menyalakan dan mematikan alat *Campimetry*
- 2. Mengetahui Langkah-langkah pemeriksaan *perimetry*

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostic di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

- A. Persiapan Alat**
- 1. Alat *Campimetry*
 - 2. Meja alat
 - 3. *Printer*
- B. Persiapan Petugas dan Pasien**
- 1. Pastian kabel sudah terhubung antara alat *Campimetry* dan kabel
 - 2. Cek rencana tindakan keperawatan dan identifikasi pasien
 - 3. Cuci tangan
 - 4. Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan pada pasien
- C. Prosedur**
- Menghidupkan Campimetry**
- 1. Sambungkan kabel Listrik
 - 2. Tekan tombol "*Power*" pada *campimetry*
 - 3. Pastikan monitor sudah menyala
- Pemeriksaan Campimetry**
- 1. Klik "*F2*" untuk *New Patient*, isi data dan klik "*add patient*"
 - 2. Pilih jenis pemeriksaan
 - 3. Pilih sisi mata yang akan diperiksa
 - 4. Instrksikan pasien untuk menempatkan dagu dan dahi panda sandarannya
 - 5. Pastikan posisi mata sudah sesuai pada layar monitor
 - 6. Klik "*Start*" untuk memulai pemeriksaan
 - 7. Instruksikan pasien untuk melihat pada lampu fiksasi kemudian klik "*Start*" untuk memastikan ketepatan posisi pupil
 - 8. Instruksikan pasien memencet tombol yang telah disiapkan apabila melihat garis-garis muncul pada alat *campimetry*
 - 9. Pindahkan posisi ke sisi mata yang berikutnya
 - 10. Print hasil pemeriksaan

	PROSEDUR PEMERIKSAAN <i>CAMPIMETRY</i>		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/1916/2024	No. Revisi: 1	Halaman: 2/2
PROSEDUR	Mematikan <i>Campimetry</i> 1. Klik "<i>Exit</i>" pada menu 2. Klik "<i>Shut down</i>" 3. Tunggu sampai monitor pada kondisi "<i>Save to power off</i>" 4. Tekan tombol "<i>Power Off</i>" 5. Cabut kabel dari sumber Listrik Hal yang perlu diperhatikan : Pastikan stop kontak terpasang dengan benar dan tidak longgar Dokumentasi: Dokumentasikan dalam catatan integrasi dalam <i>Electronic Health Record (EHR)</i>, formulir rencana dan tindakan keperawatan, dan <i>nursing note</i>.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik		