



RS Pusat Otak Nasional
Jl. MT Haryono Jakarta 13630

PEMBERSIHAN DAN DEKONTAMINASI AMBULANCE

No. Dokumen:

DT.02.02/KKXIX.1675/2018

No. Revisi:

00

Halaman:

1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit:

26 Februari 2018

Ditetapkan Oleh :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC., MARS
NIP.196209131988031002

PENGERTIAN

Proses pembersihan adalah memberihkan semua kotoran yang menempel pada permukaan mobil ambulance dan peralatan yang terdapat didalamnya dan menggunakan bahan air dan deterjen.

Proses dekontaminasi adalah menghilangkan mikroorganisme kecuali endospora yang menempel di mobil ambulance dan peralatan yang terdapat didalamnya dan menggunakan bahan desinfektan yang mengandung zat aktif hipoklorit.

TUJUAN

1. Diharapkan dapat menurunkan resiko penularan patogen melalui darah dan cairan tubuh pasien dari sumber yang diketahui maupun tidak diketahui
2. Terciptanya suasana yang bersih, rapi dan nyaman
3. Dapat siap digunakan kapan saja dan sewaktu waktu
4. Memutus mata rantai penularan infeksi melalui peralatan yang berada dimobil ambulance

KEBIJAKAN

1. Pembersihan rutin mobil ambulance dilakukan 2x sehari oleh shift pagi dan sore
2. Apabila mobil dan peralatan didalamnya sudah terpakai dan tercemar oleh cairan tubuh, darah, urine pasien maka dilakukan dekontaminasi diawal jadwal rutin
3. Proses dekontaminasi dilakukan di IGD dengan menggunakan bahan desinfektan, atau ke sterilisasi sentral bila membutuhkan penanganan lebih lanjut

PROSEDUR

A. Persiapan alat-alat:

1. Sarung tangan
2. Cairan desinfektan (TERALIN)
3. Lap basah dan Lap Kering
4. Sikat (bila diperlukan)

B. Cara Kerja

1. Petugas / sopir mencuci tangan
2. Petugas / sopir memakai APD (alat pelindung diri) yaitu sarung tangan dan masker
3. Petugas /sopir membersihkan semua darah, cairan tubuh dan kotoran yang terlihat oleh mata dengan air atau dengan cairan desinfektan
4. Petugas / sopir menyemprotkan cairan desinfektan pada permukaan
5. Petugas/ sopir mengusap permukaan / alat –alat kesehatan yang berada di ambulance
6. Setelah itu keringkan segera permukaan dengan lap kering
7. Petugas / sopir melepas sarung tangan dan mencuci tangan
8. Petugas / sopir membereskan alat-alat dan meletakkan kembali ditempat semula

C. Manajemen Lingkungan

1. Linen yang telah digunakan pasien langsung dimasukkan ke dalam plastik kuning



RS Pusat Otak Nasional
Jl. MT Haryono Jakarta 13630

PEMBERSIHAN DAN DEKONTAMINASI AMBULANCE

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

00

2/2

2. Peralatan pasien yang digunakan sekali pakai (selang O₂, suction catheter, elektrode, spuit dll) dalam proses perawatan di ambulance segera dibuang ke tempat sampah infeksius
3. Peralatan pasien yang digunakan kembali (ambu bag, monitor EKG, Oksigen kit, tensimeter, ventilator, termometer, stetoskop dll) dilakukan dekontaminasi dengan cairan desinfektan
4. Peralatan pasien seperti set bedah, tongue spatel, botol suction, sirkuit ventilator dilakukan desinfektan tingkat tinggi di Sterilisasi Sentral
5. Stretcher (brankar ambulance), scoop stretcher (alat memindahkan pasien), vacuum mattress, collar kneck, dilakukan proses pembersihan dengan menggunakan desinfektan dan air.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Gawat Darurat
2. Petugas Ambulance / Sopir