

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PROSEDUR MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN ALAT TREADMILL		
	No. Dokumen : <i>01.02.02/xx/x1x1/3650 43/2018</i>	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
SPO	Tanggal Terbit : <i>30 April 2018</i>	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Menghidupkan dan mematikan alat <i>Treadmill</i> adalah salah satu cara untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan fungsi alat <i>Treadmill</i> .		
TUJUAN	Agar tidak terjadi kesalahan urutan dalam prosedur menyalakan atau mematikan alat <i>Treadmill</i>		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor : HK.02.04/II/2608/2016 tentang Pedoman Pelayanan Neurodiagnostik		
PROSEDUR	A. Peralatan 1. Kabel rol 2. Mesin <i>Software</i> 3. Mesin <i>Walker</i> B. Persiapan 1. Persiapkan ruangan <i>Treadmill</i> 2. Pastikan AC tetap dalam keadaan menyala C. Pelaksanaan Menghidupkan alat : 1. Hubungkan kabel alat dengan stop kontak. 2. Tekan tombol "On" pada bagian belakang mesin (mesin <i>software</i>), kemudian tekan tombol "Power On" pada bagian samping mesin (mesin <i>software</i>). 3. Tekan tombol "On" pada mesin <i>walker</i>. 4. Setelah mesin menyala pilih ikon "User" pada layar <i>software</i>, masukkan <i>password</i> "User". 5. Aplikasi siap digunakan Mematikan alat : 1. Pilih menu "Shut Down" pada layar. 2. Setelah layar mati lalu matikan mesin dengan menekan tombol "Off" pada bagian belakang mesin <i>software</i>. 3. Tekan tombol "Off" pada mesin "Walker". 4. Cabut kabel dari stop kontak.		



**Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional**

**PROSEDUR MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN ALAT
TREADMILL**

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :
2/2

Hal yang perlu diperhatikan :

1. Pastikan stop kontak terpasang dengan benar dan tidak longgar.
2. Pastikan tombol **"STOP emergency"** pada alat *walker* tidak dalam keadaan **"On"**.

Unit Terkait :

1. Ruang Neurodiagnostik
2. Elektromedik