
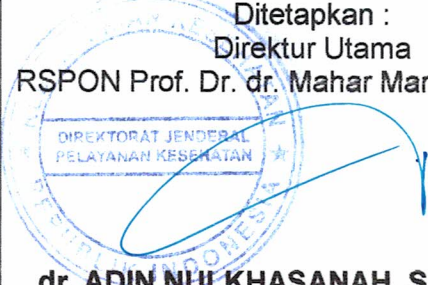


	PENGOPERASIAN ALAT POCT KETON		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/704/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 05 Agustus 2024	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Prosedur pengoperasian <i>Keton Hospital Meter</i> berdasarkan buku petunjuk pengoperasian alat <i>Keton Hospital Meter Nova Express</i> .		
TUJUAN	1. Sebagai petunjuk atau pedoman dalam melakukan setiap proses pengerjaan dengan alat <i>Keton Hospital Meter</i> . 2. Menjamin pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai prosedur.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama RSPON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	1. Prinsip kerja alat Teknik pengukuran secara elektrokimia dengan produk muatan listrik yang setara kadar keton dalam darah 2. Spesimen a. Kapiler, vena, arteri, dan neonatus <i>whole blood</i> b. Jumlah spesimen : 0,8 uL c. Plasmadengan antikoagulan heparin (<i>Lithium / Sodium</i>) 3. Batas baca alat a. Nilai rujukan : <0,6mmol/L b. Batas nilai tinggi : 8,0 mmol/L, jika hasil lebih tinggi dari 8,0 mmol/L hasil pada alat akan menunjukkan "HI". 4. <i>Quality control</i> a. Menggunakan 3 (tiga) level cairan kontrol, yaitu level 1, level 2, dan level 3. b. Penanganan hindari sinar langsung matahari dan daerah lembab c. Penyimpanan kontrol bertahan selama 90 hari setelah dibuka 5. Persiapan Pranata Laboratorium Kesehatan / Perawat a. Prosedur cuci tangan b. Menggunakan alat pelindung diri (APD) 6. Langkah kerja pengoperasian alat POCT Kreatinin a. Ujung strip Keton yang berwarna keemasan dimasukkan pada alat b. Spesimen darah ditetaskan dengan posisi alat harus lebih rendahdari posisi spesimen c. Hasil akan muncul setelah 6 detik. d. Hasil pengukuran akan muncul pada layar. e. Hasil pengukuran dicatat di lembar kerja pemeriksaan keton.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		

ALUR PENGOPERASIAN ALAT POCT KETON

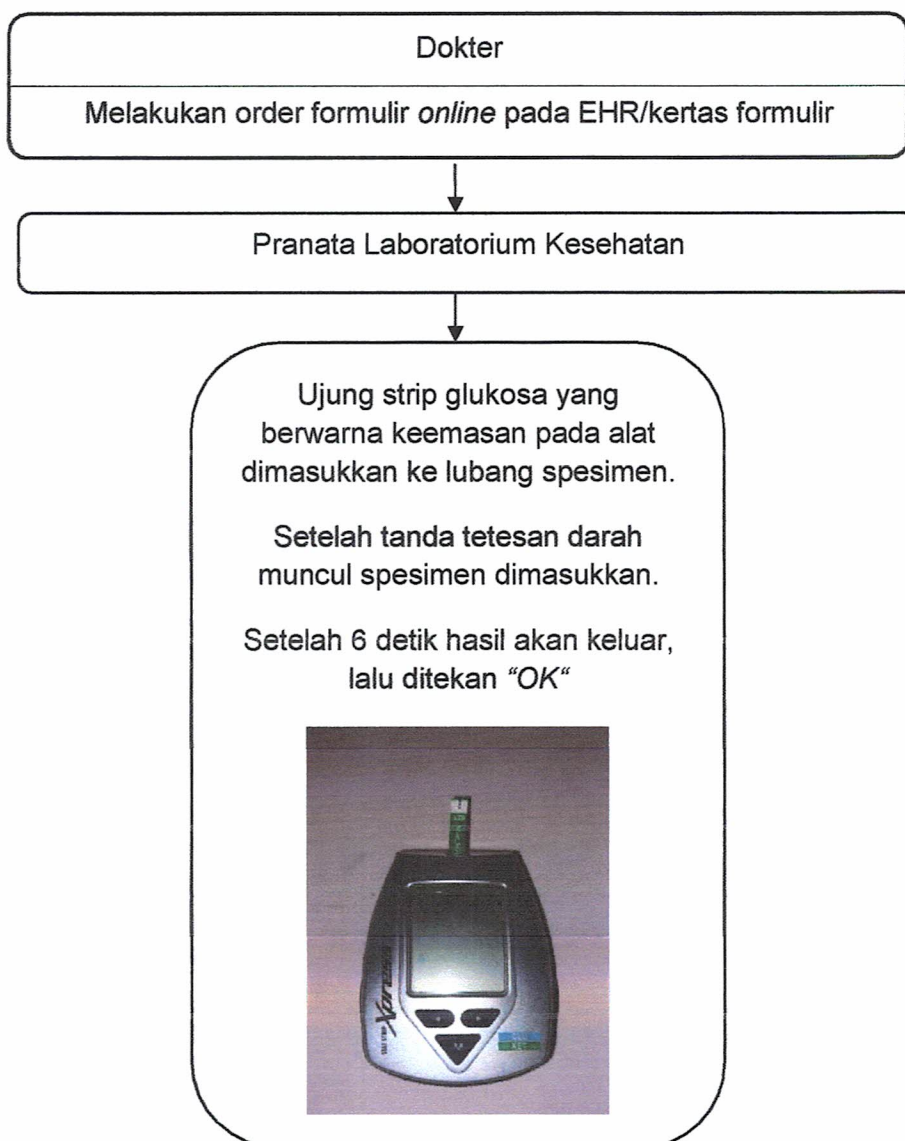

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof.Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	OT.02.02/D.XXIII/2104/2024
		Tanggal Efektif	:
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal	: 07 Februari 2024	☐ Penambahan Dokumen
Nama	: dr. Hastrina Mailani, Sp.PA	☒ Perubahan Dokumen
Unit Kerja	: Instalasi Laboratorium dan Bank Darah	☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
NIP. 198605282012122001

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX.I/3069/2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium. 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah. 3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar 4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
				Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/XXXIX.1/2742/2018	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/XXXIX/9102/2022
				Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
				Logo, kop lama	Mengganti logo dan kop baru
					Memperbaiki prosedur (menambahkan prinsip, batas baca alat, QC, persiapan PLK, dan menmbah langkah kerja)