



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional

## PEMBERSIHAN TROLLY DAN BOX KONTAINER

Nomor Dokumen :

OT.02.04/XXXIX.1/  
2317/2018

No. Revisi :

00

Halaman :

1/1

<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b></p>	<p>Tanggal terbit  28 Maret 2018</p>	<p>Ditetapkan : Direktur Utama,  dr. Mursyid Bustami, SpSi(K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002</p> 
<p><b>PENGERTIAN</b></p>	<p>Trolley adalah alat operasional yang digunakan untuk mengantar instrumen kotor dari ruangan ke sterilisasi sentral, dan mengambil instrumen steril dari sterilisasi sentral ke ruangan.</p> <p>Box kontainer tertutup untuk instrumen kotor adalah tempat/ wadah yang digunakan untuk menyimpan instrumen kotor dari ruangan yang akan diantar ke sterilisasi sentral sehingga tidak mengkontaminasi area lain selama perjalanan.</p> <p>Box kontainer tertutup untuk instrument bersih adalah tempat/ wadah yang digunakan untuk menyimpan instrumen steril dari sterilisasi sentral ke ruangan sehingga tidak terkontaminasi area lain selama perjalanan.</p>	
<p><b>TUJUAN</b></p>	<p>Agar Trolley dan Box Kontainer tetap bersih, terawat, dan tidak menjadi sumber infeksi silang.</p>	
<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<p>SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.</p>	
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuci tangan dan gunakan APD</li> <li>2. Petugas unit kerja (POS), setelah selesai serah terima instrumen kotor langsung ke area cuci trolley dan box kontainer.</li> <li>3. Peralatan pembersihan dan perendaman box kontainer sudah disiapkan petugas sterilisasi sentral.</li> <li>4. Rendam box kontainer didalam box perendaman selama 5 menit, cuci kemudian bilas dan keringkan dengan lap kering yang telah disediakan.</li> <li>5. Swab trolley dengan cairan desinfektan dan diamkan selama 5 menit.</li> <li>6. Trolley dan box kontainer dibersihkan setiap hari.</li> <li>7. Lepaskan APD lalu cuci tangan.</li> <li>8. Lakukan dokumentasi.</li> </ol>	
<p><b>UNIT TERKAIT</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sterilisasi Sentral.</li> <li>2. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Ruang Perawatan/ unit kerja lainnya.</li> </ol>	
<p><b>DOKUMEN TERKAIT</b></p>	<p>Dokumentasi Pembersihan Trolley dan Box kontainer</p>	