

 <p>Rumah Sakit Pusat Otak Nasional</p>	<b>VALIDASI HASIL PENCUCIAN ALAT DAN INSTRUMEN</b>	
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXI.I /16676/2019	No. Revisi : 00
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal terbit  18 OKTOBER 2019	Ditetapkan : Direktur Utama,  Dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002
<b>PENGERTIAN</b>	Proses pemeriksaan kembali peralatan medis yang telah melalui proses pencucian.	
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai <i>barrier</i> dan meminimalisir kemungkinan lolosnya alat medis yang tidak sesuai standar.</li> <li>2. Mengetahui lebih dini jika ditemukan alat yang masih kotor dan rusak secara kasat mata.</li> <li>3. Mencegah dan memastikan alat medis yang masih kotor dan cacat/ rusak tidak sampai di kemas.</li> </ol>	
<b>KEBIJAKAN</b>	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/16583/2019, tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.	
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD.</li> <li>2. Validasi hasil pencucian yang dilakukan di area dekontaminasi.</li> <li>3. Saat proses pengeringan lakukan uji visual alat dan instrumen.</li> <li>4. Setelah alat kering lakukan uji fungsi</li> <li>5. Jika ditemukan alat medis yang masih kotor, segera rendam, cuci dan bilas, kemudian keringkan.</li> <li>6. Jika ditemukan alat medis yang berkarat, segera rendam di cairan penghilang karat, kemudian cuci, bilas dan keringkan.</li> <li>7. Jika ditemukan engsel alat medis yang kesat, segera lumasi sampai engsel berfungsi normal.</li> <li>8. Jika ditemukan alat medis yang cacat, rusak, dan tidak layak, segera laporkan ke penanggung jawab sterilisasi sentral dan lakukan konfirmasi ke ruangan yang bersangkutan.</li> <li>9. Lepas APD dan cuci tangan.</li> </ol>	
<b>Unit Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sterilisasi Sentral</li> <li>2. Instalasi Bedah Sentral</li> <li>3. Intensive Care</li> <li>4. Rawat Inap dan Rawat Jalan</li> </ol>	
<b>Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Uji Fungsi</li> <li>2. Formulir Permintaan Sterilisasi</li> <li>3. Formulir Perawatan Alat Medis</li> <li>4. Formulir Kronologis Alat Medis Rusak</li> </ol>	