

|                                                                                                                                     |                                               |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|
|  <p><b>Rumah Sakit</b><br/>Pusat Otak Nasional</p> | <b>UJI BOWIE DICK</b>                         |                    |                  |
|                                                                                                                                     | Nomor Dokumen :<br>OT.02.02/XXXIX.2/2341/2018 | No. Revisi :<br>01 | Halaman :<br>1/1 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STANDAR<br>PROSEDUR<br>OPERASIONAL | <p>Tanggal terbit</p> <p>28 Maret 2018</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Ditetapkan :<br/>Direktur Utama,</p>  <p>dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS<br/>NIP. 196209131988031002</p>  |
| PENGERTIAN                         | Uji Bowiedick adalah uji fungsi mesin, untuk mengetahui efisiensi pompa vakum mesin steam autoclave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TUJUAN                             | Untuk mengetahui unjuk kerja pompa vakum steam autoclave sebelum proses sterilisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| KEBIJAKAN                          | SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROSEDUR                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuci tangan dan gunakan APD</li> <li>2. Ambil Bowiedick,: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bila dalam bentuk strip masukkan kedalam PCD/ helix test, kemudian letakkan PCD kedalam keranjang</li> <li>b. jika dalam bentuk Pack, letakkan diadalam keranjang pack bowiedicknya.</li> </ol> </li> <li>3. Masukkan keranjang berisi bowiedick kedalam chamber mesin steam autoclave, dengan posisi penempatan tepat diatas lubang buangan/ drain.</li> <li>4. Start proses dengan memilih program bowiedick.</li> <li>5. Jika proses bowiedick telah selesai, keluarkan keranjang dari dalam chamber, dan ambil PCD/ pack</li> <li>6. Buka PCD/ Pack dan lihat perubahan kertas bowiedick <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebelum proses kertas bowiedick berwarna kuning</li> <li>b. Setelah proses akan berubah menjadi hitam sempurna/ coklat terang sempurna, dan kondisi tersebut dinyatakan bagus.</li> <li>c. Jika perubahan kertas bowiedick tidak hitam merata atau coklat terang merata, maka proses dinyatakan gagal.</li> <li>d. Jika proses gagal, lakukan bowiedick ulang</li> <li>e. Jika bowiedick kedua gagal, segera laporkan ke penanggung jawab sterilisasi sentral untuk ditindak lanjut.</li> </ol> </li> <li>7. Isi kolom nama, kode operator, kode mesin, dan tangggal proses bowiedick di kolom kertas bowiedick yang tersedia.</li> <li>8. Tempelkan kertas bowiedick di formulir monitoring mesin.</li> <li>9. Lakukan dokumentasi.</li> <li>10. Lepas APD lalu cuci tangan.</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| UNIT TERKAIT                       | Sterilisasi Sentral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DOKUMEN TERKAIT                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kertas Bowiedick.</li> <li>2. Formulir monitoring mesin steam autoclave.</li> <li>3. Chart proses mesin steam autoclave.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |