

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	DESINFEKSI TINGKAT TINGGI (DTT)		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXIX.1/ 2327/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Desinfeksi Tingkat tinggi adalah proses menghilangkan mikroorganisme vegetatif, basil, jamur, virus dan beberapa spora.		
TUJUAN	Menghasilkan instrumen kritikal dan semi kritikal yang aman digunakan ke pasien .		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.1/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Petugas mencuci tangan dan gunakan APD. 2. Siapkan peralatan yang akan dipakai. 3. Tuangkan enzymatik/ disinfektan yang akan dipakai kedalam sink/ bak perendaman sesuai tabel dosis penggunaan, kemudian aduk hingga rata. 4. Tuangkan cairan DTT yang akan dipakai kedalam Sink/ bak perendaman yang lain sesuai kebutuhan. 5. Lakukan uji efektivitas cairan DTT dengan menggunakan indikator strip dengan hasil baik dan dokumentasikan. 6. Rendam instrument kedalam cairan enzymatic/ disinfektan sesuai tabel. 7. Lakukan penyikatan instrumen dibawah permukaan air 8. Bilas instrument dengan air mengalir, bila masih ada kotoran yang menempel lakukan penyikatan ulang sampai noda hilang. 9. Setelah instrument bersih, rendam instrumen dalam sink/ bak berisi cairan kimia DTT sesuai instruksi pabrikan. 10. Bilas instrument dengan air steril. 11. Keringkan dengan lap steril yang tidak mengandung serat. 12. Simpan instrument dalam lemari penyimpanan khusus, bebas debu, dan kelembabannya terjaga. 13. Semua instrument yang disimpan didalam lemari penyimpanan/ kontainer, harus di DTT ulang 2- 4 jam sebelum digunakan. 14. Simpan kembali cairan DTT, jika telah selesai digunakan. 15. Lepas APD, kemudian cuci tangan. 16. Lakukan dokumentasi		
UNIT TERKAIT	1. Sterilisasi Sentral. 2. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Ruang Perawatan/ unit kerja lainnya.		
DOKUMEN TERKAIT	1. Formulir permintaan sterilisasi instrumen barang re-use. 2. Formulir Swab efektivitas cairan DTT.		