

PROSEDUR PEMERIKSAAN FUNDUSCOPY



No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/1913/2024

No. Revisi :
1

Halaman :
1/2

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR

Tanggal Terbit:
22 Februari 2024

Ditetapkan:
Direktur Utama
dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS

PENGERTIAN

Pemeriksaan Funduscopy yaitu pemeriksaan foto bola mata dengan serangkaian procedural yang benar cara menghidupkan, cara pemeriksaan dan cara mematikan alat *Funduscopy* yang berupa perangkat keras terdiri dari monitor, kamera, kabel dan meja alat

TUJUAN

Agar tidak terjadi kesalahan urutan prosedur menyalakan dan mematikan alat *Funduscopy* serta prosedur pemeriksaan Funduscopy

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostic di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

- A. Persiapan Alat**
- 1. Alat *Funduscopy*
 - 2. Meja dan kabel
 - 3. Printer
- B. Persiapan Petugas dan Pasien**
- 1. Pastikan alat *Funduscopy* sudah terhubung dengan arus listrik
 - 2. Cek rencana tindakan keperawatan dan identifikasi pasien
 - 3. Identifikasi kemampuan pasien
 - 4. Cuci tangan
 - 5. Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan pada pasien
- C. Prosedur**
- Menyalakan alat *Funduscopy***
- 1. Tekan tombol “Power On” pada mesin
 - 2. Nyalakan monitor alat
 - 3. Pastikan monitor nyala
- Pemeriksaan Funduscopy**
- 1. Pastikan sudah masuk pada aplikasi *Funduscopy*
 - 2. Buka tombol pengunci alat dan pengaman lensa
 - 3. Masukkan data pasien baru dengan menekan tombol “New” atau mencari data pasien yang sudah ada di *database Funduscopy* dengan memasukkan nama pasien pada kolom “SEARCH”
 - 4. Pilih nama pasien yang akan difoto fundus, kemudian tekan tombol bergambar *Funduscopy*. Lalu pilih tekan “Yes”
 - 5. Posisikan dagu pasien pada sandaran dagu, pastikan dagu dan dahi menempel pada sandarannya
 - 6. Posisikan kamera pada salah satu mata pasien
 - 7. Atur ketinggian dagu sesuai pengukur ketinggian pelipis
 - 8. Instruksikan pasien untuk melihat pada arah depan

	PROSEDUR PEMERIKSAAN <i>FUNDUSCOPY</i>		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/1913/2024	No. Revisi: 1	Halaman: 2/2
	9. Posisikan maju kamera, instruksikan pasien untuk melihat kearah lampu berwarna hijau/tanda "x" yang berada di dalam kamera 10. Atur tinggi rendah kamera Kembali hingga posisi sesuai 11. Ambil gambar dengan mode Default dan Optic Disk 12. Pindahkan posisi kamera pada sisi mata lainnya Mematikan alat <i>Funduscopy</i> 1. Pada tampilan "<i>Patient Manager</i>", pilih menu "<i>File</i>" kemudian pilih "<i>Exit</i>" 2. Kemudian pilih "<i>Continue</i>" 3. Tunggu beberapa saat hingga alat benar-benar dalam keadaan mati 4. Tekan tombol "<i>Power OFF</i>" pada alat 5. Cabut kabel Hal yang perlu diperhatikan : 1. Pastikan stop kontak terpasang dengan benar dan tidak longgar. 2. Kesalahan urutan dalam prosedur menyalakan atau mematikan dapat beresiko membuat perangkat <i>Funduscopy</i> menjadi rusak Dokumentasi: Dokumentasikan dalam catatan integrasi dalam <i>Electronic Health Record (EHR)</i>, formulir rencana dan tindakan keperawatan, dan <i>nursing note</i>.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik		