


	PENGOPERASIAN ALAT NOVABIOMEDICAL PHOX		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/11896/2025	No. Revisi : 02	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 25 Juli 2025	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,  dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, M.A.R.S.	
PENGERTIAN	Merupakan prosedur baku yang memuat tata cara pengoperasian alat Novabiomedical pHox untuk pemeriksaan Analisa Gas Darah (AGD).		
TUJUAN	Sebagai panduan bagi Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) di dalam mengoperasikan alat Novabiomedical pHox untuk pemeriksaan AGD dari menghidupkan hingga mematikan alat.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	A. Menghidupkan Alat 1. Menyambungkan saklar UPS ke saklar listrik, lalu menekan tombol “ON” pada UPS. 2. Menekan tombol “ON” pada alat Novabiomedical pHox. 3. Menunggu alat melakukan pengecekan sendiri atau <i>Power On Self Test</i> (POST) yang ditandai dengan munculnya logo <i>pHox Series Analyzer</i> pada monitor. 4. Menunggu 15 menit agar suhu alat stabil dan alat melakukan kalibrasi internal. B. Mematikan Alat ➤ Mematikan alat dengan menekan tombol “OFF” di belakang alat.		
UNIT TERKAIT	1. IPSRS (Teknisi Listrik) 2. Pihak Eksternal (Vendor Alat)		

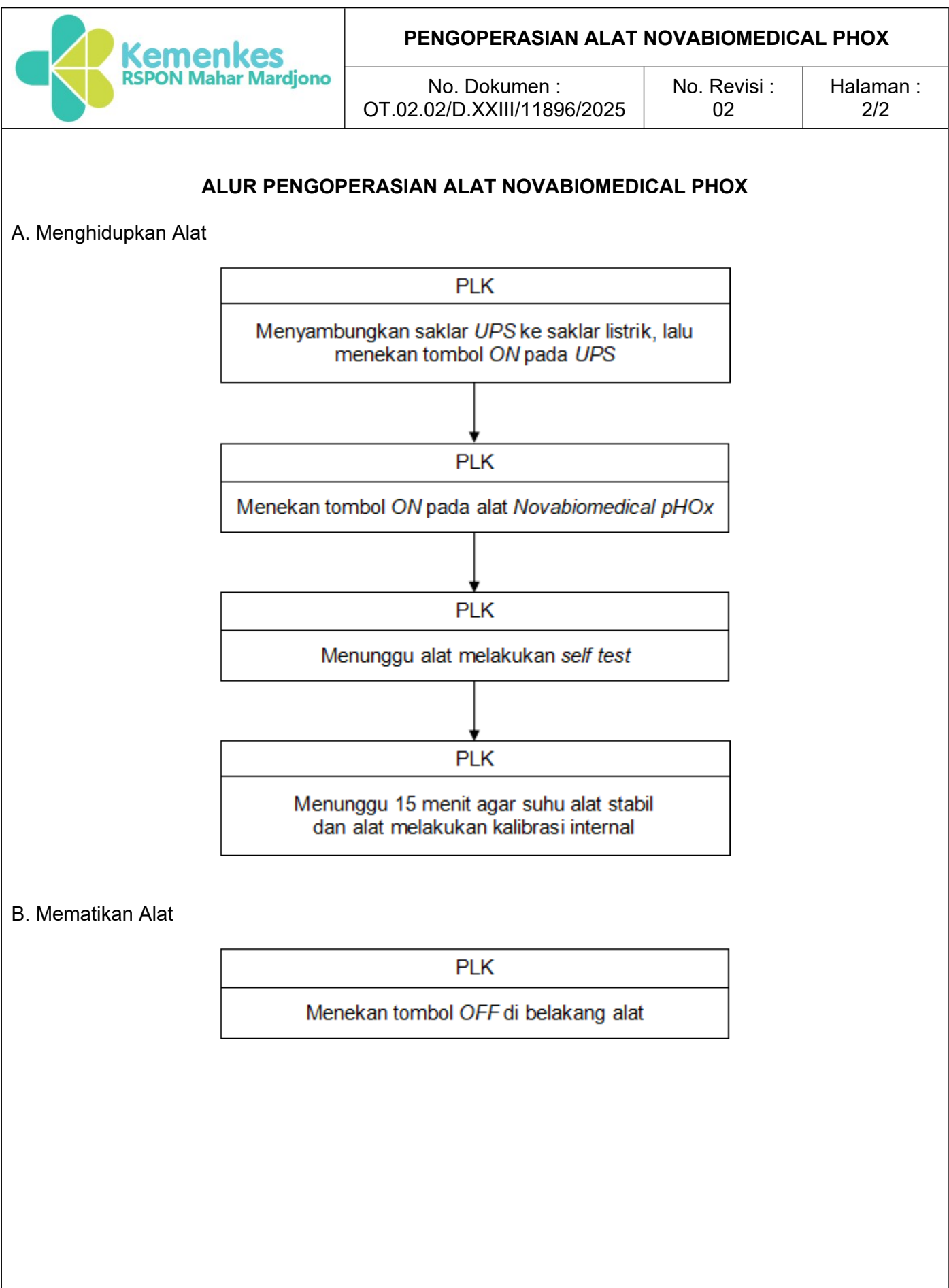

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/11896/2025
		Tanggal Efektif	: 25 Juli 2025
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 5 Desember 2024
Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen
☒ Perubahan Dokumen
☐ Pengurangan Dokumen
Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

Ka. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX/3279/2018; 16 April 2018	ke-2	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : -	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa .	➢ Kop dan logo lama ➢ Ada prosedur pengerjaan <i>Quality Control</i> dan pemeriksaan spesimen.	➢ Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi unit terkait. ➢ Menghapus prosedur pengerjaan <i>Quality Control</i> dan pemeriksaan spesimen.