


	PENGOPERASIAN ALAT STARDUST MC-15		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/5521/2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 12 Juni 2024	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Prosedur tetap yang memuat tata cara pengoperasian alat StarDust MC-15		
TUJUAN	Sebagai panduan Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) dalam mengoperasikan alat StarDust MC-15		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	1. Menyalakan Alat Stardust MC-15 - Menyambungkan Saklar <i>UPS</i> ke saklar listrik, lalu menekan tombol <i>ON</i> pada <i>UPS</i> dan voltase, menunggu sampai stabil - Menekan tombol <i>ON</i> pada alat STARDUST MC-15 - Menunggu alat Stardust MC-15 sampai selesai melakukan inisialisasi sistem - Menunggu alat Stardust MC-15 selama 15 menit agar alat siap bekerja pada temperatur kerja (suhu 37°C) 2. Memeriksa persediaan kertas printer pada alat 3. Melakukan <i>maintenance</i> setiap pagi (lihat SPO Pemeliharaan dan Kalibrasi StarDust MC-15) 4. Mengerjakan kalibrasi dan <i>quality control</i> (pada parameter pemeriksaan yang belum terdapat faktor atau merubah faktor yang sudah ada karena <i>quality control</i> tidak masuk range, <i>quality control</i> melanggar aturan <i>westgard</i>, dan nomor Lot reagen diganti). Prosedur kerja dapat dilihat pada SPO Kalibrasi dan <i>Quality Control</i> alat StarDust MC-15. 5. Mengerjakan <i>quality control</i> setiap pagi (lihat SPO Kalibrasi dan <i>Quality Control</i> alat StarDust MC-15) 6. Mengerjakan pemeriksaan spesimen sesuai SPO (lihat SPO Pemeriksaan Spesimen alat StarDust MC-15) 7. Mematikan Alat Stardust MC-15 - <i>Display</i> berada pada menu utama - Mengerjakan <i>maintenance</i> setiap sore (lihat SPO Pemeliharaan dan Kalibrasi StarDust MC-15) - Memastikan Multikuvet tidak ada dalam <i>incubator</i>, <i>mixer</i>, ataupun <i>reading zone</i> - Menekan tombol <i>OFF</i> pada alat StarDust MC-15 - Menekan tombol <i>OFF</i> pada UPS dan cabut saklar UPS dari saklar listrik		
UNIT TERKAIT	1. Teknisi Elektromedis (Penunjang RSPON) 2. Teknisi IPSRS (terkait listrik) 3. Pihak Eksternal (Teknisi Vendor Alat Stardust MC-15)		

ALUR PENGOPERASIAN ALAT STARDUST MC-15

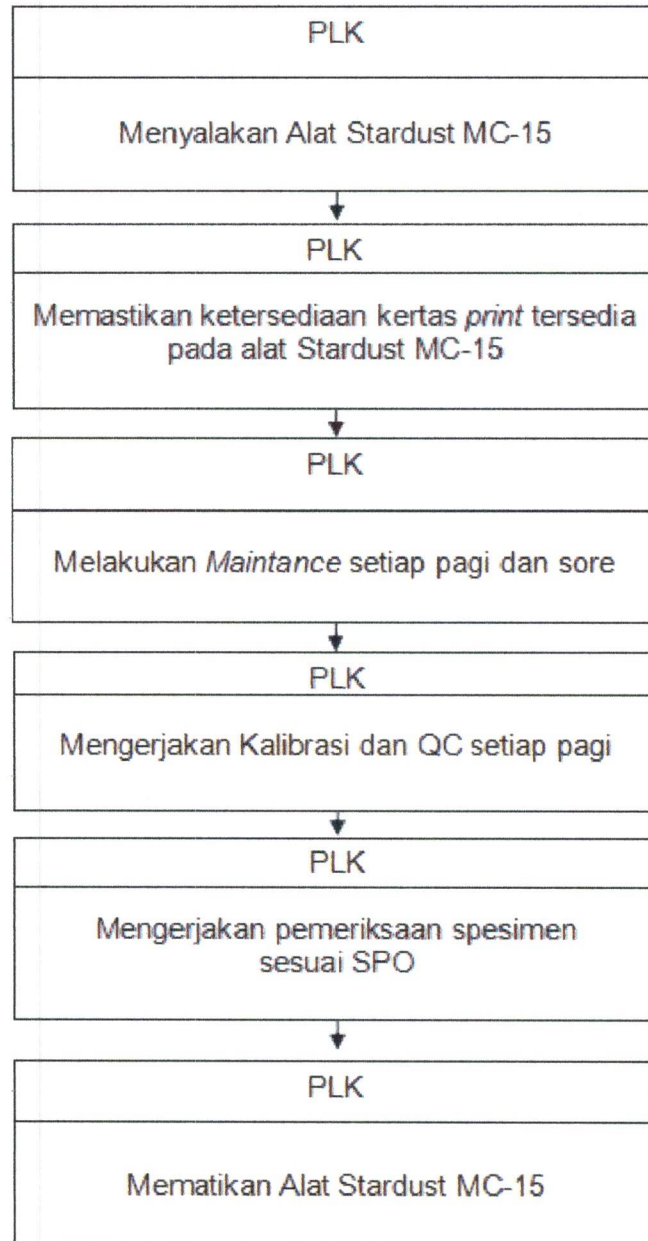

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta		No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/5521/2024
	"Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen"		Tanggal Efektif	: 12 Juni 2024
			Halaman	: 2 (dua) halaman

TTD PEMOHON



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
NIP. 198605282012122001

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 20 Februari 2024

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen

☒ Perubahan Dokumen

☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/ XXXIX.1/3218/2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. 3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar 4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulhasanah, Sp.S., MARS"
				Nomor SK Kebijakan : tidak dicantumkan	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
				Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
				Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi prosedur, revisi unit kerja