

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENGUNAAN LABEL GUN		
	Nomor Dokumen : <i>OT.02.03/XXXIX.I/2308/2018</i>	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002	
PENGERTIAN	Penggunaan label gun adalah tata cara pelabelan dengan menggunakan label gun sebagai perekat.		
TUJUAN	Untuk mengetahui tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, kode mesin, siklus, dan kode operator mesin.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Cuci tangan kemudian gunakan APD. 2. Isi label gun dengan tinta roll dan indikator label roll sesuai jenis sterilisasi. 3. Setting baris pertama pada label gun sesuai keperluan yang di inginkan (kode sterilisasi sentral, kode mesin, siklus, dan kode operator mesin) 4. Setting baris ke dua pada label gun sesuai tanggal proses sterilisasi. 5. Setting baris ke tiga pada label gun sesuai tanggal perkiraan kadaluarsa alat steril 6. Rekatkan indikator label ke setiap pembungkus alat/ instrument yang akan di sterilkan. 7. Jangan menyentuh indikator label yang baru di rekatkan sampai tinta benar-benar kering. 8. Lakukan penggantian indikator label roll jika sudah habis. 9. Lepaskan APD lalu cuci tangan.		
UNIT TERKAIT	1. Sterilisasi Sentral 2. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Ruang Perawatan/ unit kerja lainnya.		
DOKUMEN TERKAIT	1. Formulir permintaan sterilisasi instrument re use 2. Status pasien		