

	PROSEDUR PEMERIKSAAN <i>PERIMETRY</i>		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/1912/2024	No. Revisi : 1	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit: 22 Februari 2024	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. ADIN NULKHASANAHI, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Pemeriksaan <i>perimetry</i> yaitu serangkaian prosedur mulai dari prosedur menghidupkan alat, prosedur pemeriksaan <i>perimetry</i> atau lapang pandang pada pasien serta prosedur mematikan alat <i>perimetry</i>		
TUJUAN	1. Agar tidak terjadi kesalahan urutan dalam prosedur dalam menyalakan dan mematikan alat <i>Perimetry</i> 2. Mengetahui Langkah-langkah pemeriksaan <i>perimetry</i>		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostic di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	A. Persiapan Alat 1. Alat <i>Perimetry</i> 2. Meja dan kabel 3. Printer B. Persiapan Petugas dan Pasien 1. Pastikan kabel sudah terhubung antara alat <i>Perimetry</i> dan kabel 2. Cek rencana tindakan keperawatan dan identifikasi pasien 3. Cuci tangan 4. Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan pada pasien C. Prosedur a. Menghidupkan <i>Perimetry</i> 1. Sambungkan kabel alat ke sumber Listrik 2. Pastikan lampu ruangan dalam keadaan mati (ruangan gelap) 3. Tekan tombol "Power On" pada <i>Perimetry</i> 4. Pastikan monitor alat menyala b. Pemeriksaan <i>Perimetry</i> 1. Isi identitas pasien 2. Pilih jenis pemeriksaan Central 24-2 3. Pilih sisi mata pasien yang akan diperiksa 4. Atur posisi pasien menyesuaikan sandaran dagu 5. Pastikan posisi mata sudah sesuai pada layar monitor 6. Klik "<i>Start</i>" untuk memulai pemeriksaan 7. Instruksikan pasien untuk melihat pada lampu fiksasi kemudian klik "<i>Start</i>" untuk memastikan ketepatan posisi pupil 8. Instruksikan pasien memencet tombol yang telah disiapkan apabila melihat nyala lampu pada alat <i>Perimetry</i> 9. Pindahkan posisi ke sisi mata yang berikutnya 10. Apabila pasien menggunakan kacamata plus, lakukan Kembali pemeriksaan tersebut dengan menggunakan kacamata pasien ataupun lensa yang sesuai 11. Print hasil pemeriksaan		

	PROSEDUR PEMERIKSAAN <i>PERIMETRY</i>		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/1912/2024	No. Revisi: 1	Halaman: 2/2
	c. Mematikan <i>Perimetry</i> 1. Tekan tombol "<i>Power Off</i>" pada alat <i>Perimetry</i> 2. Cabut kabel dari sumber Listrik Hal yang perlu diperhatikan : Pastikan stop kontak terpasang dengan benar dan tidak longgar Dokumentasi: Dokumentasikan dalam catatan integrasi dalam <i>Electronic Health Record (EHR)</i>, formulir rencana dan tindakan keperawatan, dan <i>nursing note</i>.		
UNIT TERKAIT	Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik		