

	PROSEDUR MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN ALAT TREADMILL		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/1910/2024	No. Revisi : 1	Halaman : 1/1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit : 22 Februari 2024	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Menghidupkan dan mematikan alat <i>Treadmill</i> adalah salah satu cara untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan fungsi alat <i>Treadmill</i>		
TUJUAN	Agar tidak terjadi kesalahan urutan dalam prosedur menyalakan atau mematikan alat <i>Treadmill</i>		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan dan Neurodiagnostik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional		
PROSEDUR	A. Persiapan Alat 1. Alat Treadmill 2. Kabel rol bila perlu B. Persiapan Ruangan 1. Persiapkan ruangan <i>Treadmill</i> 2. Pastikan AC tetap dalam keadaan menyala C. Prosedur Menghidupkan alat : 1. Hubungkan kabel alat dengan stop kontak 2. Tekan tombol "<i>power On</i>" pada bagian belakang monitor treadmill 3. Tekan tombol "<i>power On</i>" di bagian depan bawah alat treadmill 4. Klik aplikasi ST80i masukkan username dan password 5. Alat treadmill dapat digunakan Mematikan alat : 1. Keluar dari aplikasi ST80i 2. Klik tombol shut down di monitor treadmill 3. Tekan tombol power off di bagian bawah alat treadmill Hal yang perlu diperhatikan : 1. Pastikan stop kontak terpasang dengan benar dan tidak longgar. Pastikan tombol "<i>STOP emergency</i>" pada alat <i>walker</i> tidak dalam keadaan "<i>On</i>"		
UNIT TERKAIT	Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik		