

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	OPERASIONAL MESIN PEMOTONG POUCHES		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXIX.1/ 2314/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Mesin Pemotong pouches adalah : Mesin yang digunakan untuk memotong pouches sesuai ukuran yang di inginkan.		
TUJUAN	1. Memudahkan petugas dalam memotong pouches. 2. Pouches yang dipotong lebih presisi. 3. Efisiensi waktu.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.1/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Cuci tangan dan gunakan APD. 2. Masukkan roll pouches kedalam sela roll mesin pemotong. 3. Kaitkan pouches ke rell penahan, kemudian Tarik keluar ujung pouches. 4. Potong pouches sesuai ukuran instrument yang akan dikemas. 5. Ganti roll pouches sesuai lebar instrument yang akan dikemas. 6. Cuci tangan dan lepaskan APD.		
UNIT TERKAIT	Sterilisasi Sentral		
DOKUMEN TERKAIT	Formulir permintaan sterilisasi instrument.		