

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PERAWATAN MESIN STEAM AUTOCLAVE PREVACUM		
	Nomor Dokumen : OT.02.02/XXXIX.I/2337/2018	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	Perawatan mesin steam autoclave prevacum adalah perawatan rutin yang dilakukan untuk membersihkan chamber internal dan assesories mesin.		
TUJUAN	1. Untuk menjaga kebersihan chamber internal mesin dari karat karena sisa uap, air dan udara saat proses. 2. Memperpanjang umur pakai mesin. 3. Mengurangi resiko instrument terpapar dan terkontaminasi karat dan lumpur dari sisa proses.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.		
PROSEDUR	1. Cuci tangan dan gunakan APD. 2. Lakukan perawatan berkala. Mesin steam makin sering dipakai maka semakin cepat berpotensi timbulnya karat di dinding permukaan chamber, untuk itu diperlukan pembersihan chamber secara berkala. Cara membersihkan chamber : a. Nyalakan mesin steam yang akan dibersihkan dengan memutar panel power ke posisi ON. b. Buka pintu mesin steam, dengan catatan kran uap dan ran air dalam kondisi tertutup. c. Setelah pintu terbuka, matikan kembali mesin dengan memutar panel power ke posisi OFF dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat proses pembersihan mesin sedang berlangsung. d. Keluarkan rel tempat keranjang/ basket. e. Siapkan sikat, kanebo, cairan penghilang karat/ kotoran, dan air bersih untuk membilas. f. Bersihkan permukaan chamber dengan sikat dan cairan pembersih kemudian bilas dengan air. g. Jika chamber sudah bersih, lap dengan kain lap tanpa serat. h. Bersihkan rel tempat keranjang/ basket ditempat terpisah dengan cairan pembersih dan sikat, kemudian bilas. i. Jika rell sudah bersih, keringkan dengan menggunakan kain lap tanpa serat. j. Pasang kembali rell basket ke posisi semula. k. Nyalakan kembali mesin dengan menggeser panel power ke posisi ON		

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PERAWATAN MESIN STEAM AUTOCLAVE PREVACUM		
	Nomor Dokumen :	No. Revisi : 01	Halaman : 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 28 Maret 2018	 Ditetapkan : Direktur Utama, dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002	
PROSEDUR	3. Lepas APD, lalu cuci tangan. 4. Lakukan dokumentasi .		
UNIT TERKAIT	1. Sterilisasi Sentral. 2. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Ruang Perawatan/ unit kerja lainnya.		
DOKUMEN TERKAIT	1. Buku Catatan Dekontaminasi Alat. 2. Formulir permintaan sterilisasi instrumen barang re-use.		